



Wkładanie i wyjmowanie dźwiękowodów


1. Zaczynij od zawieszenia aparatu słuchowego na górnej części ucha.

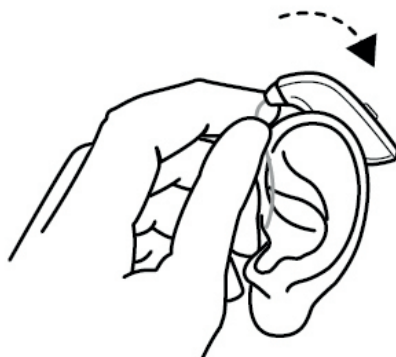

2. Następnie przytrzymaj dźwiękowód w miejscu, w którym się zgina i delikatnie wepchnij kopułkę do kanału słuchowego.

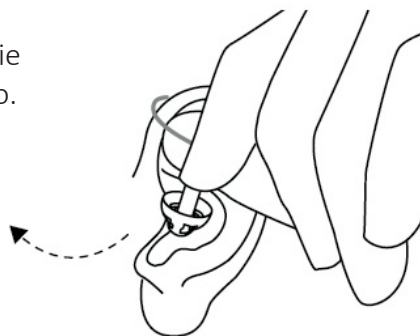

3. Wepchnij kopułkę wystarczająco głęboko do kanału słuchowego, aby dźwiękowód przylegał równo do głowy.

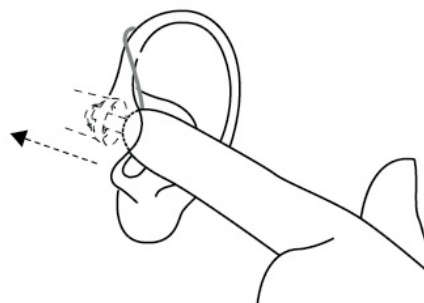


4. Na każdym dźwiękowodzie znajduje się przewód retencyjny, który należy umieścić w małżowinie usznej.

Wkładanie i wyjmowanie dźwiękowodów (ciąg dalszy)

5. Aby zdjąć aparat słuchowy, najpierw podnieś go z ucha.



6. Następnie przytrzymaj dźwiękowód w miejscu, w którym się zgina i delikatnie wyciągnij go z kanału słuchowego.

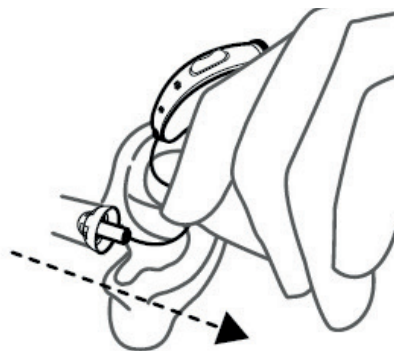

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zeskanuj kod QR lub odwiedź nasz portal wsparcia dla pacjentów pod adresem:
danalogic.co.uk/patient-portal