




# Jak wymienić dźwiękówód wkładki usznej

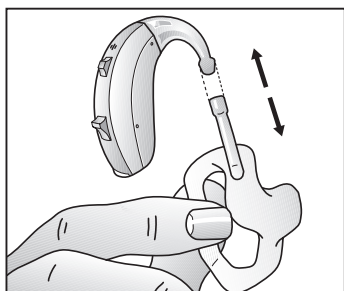


1. Zdejmij wkładkę uszną z aparatu słuchowego, a następnie wyciągnij dźwiękówód z wkładki usznej.

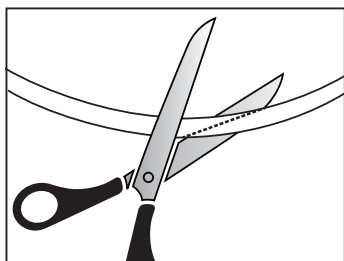

2. Przytnij w przybliżeniu ostatnie 5 cm wstępnie wygiętego kawałka przewodu, tworząc stożkową końcówkę.

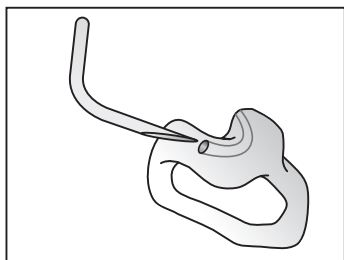


3. Włóż spiczastą końcówkę przez otwór w wkładce usznej od zewnątrz, jak pokazano na rysunku, aż wysunie się ona drugim końcem. Jeśli we wkładce usznej są dwa otwory, przepchnij dźwiękówód przez większy otwór u góry.

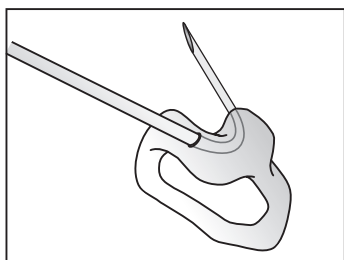


4. Przeciągnij spiczastą końcówkę dźwiękowodu przez wkładkę uszną, aż druga końcówka dźwiękowodu będzie ustawiona pionowo i płasko przylegać do wkładki.


## Jak wymienić dźwiękówód wkładki usznej (ciąg dalszy)

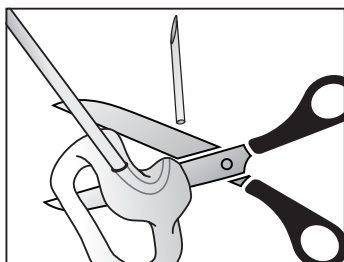

5. Odetnij spiczastą końcówkę jak najbliżej wkładki usznej. Upewnij się, że nie wystają żadne ostre krawędzie przewodu, ponieważ może to powodować podrażnienie ucha.

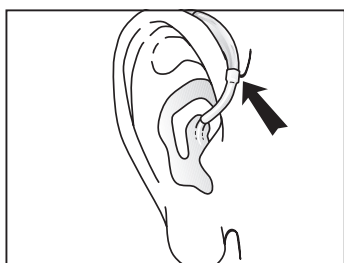

6. Teraz musisz dopasować długość przewodu do swojego ucha. Umieść stary przewód (który usunąłeś wcześniej) obok nowo zamontowanego przewodu, odmierź i utnij. Lub umieść aparat słuchowy nad uchem i zaznacz punkt, w którym krzyżuje się on z aparatem słuchowym, jak pokazano na rysunku i przetnij.

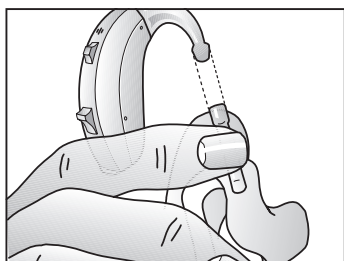

7. Aby ponownie założyć aparat słuchowy na wkładkę uszną, ściśnij górną część dźwiękówodu i dociśnij do siebie wkładkę uszną i aparat słuchowy.

**NAJLEPSZA WSKAZÓWKA:** *Dźwiękówód wkładki usznej może z czasem stać się sztywny, łamliwy lub odbarwiony. Zwykle zaleca się, aby wymieniać go przynajmniej raz na 6 miesięcy. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z wymianą przewodu wkładki usznej, skontaktuj się z miejscowym oddziałem audiologii.*



Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zeskanuj kod QR lub odwiedź nasz portal wsparcia dla pacjentów pod adresem:  
**[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)**