


Jak włączać i wyłączać aparaty słuchowe oraz wymieniać baterie

Włączanie

Po włożeniu baterii zamknij całkowicie komorę baterii, aby włączyć aparat słuchowy.

Wyłączanie

Otwórz komorę baterii aż do wycucia kliknięcia, aby wyłączyć aparaty słuchowe.

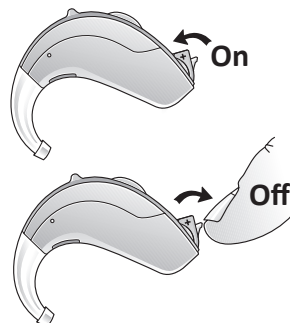

Wymiana baterii


Gdy poziom naładowania baterii jest niski

- Aparaty słuchowe wydadzą sygnał dźwiękowy, gdy bateria zacznie się wyczerpywać.
- Ten sygnał ostrzegawczy będzie powtarzany co 15 minut, aż do całkowitego wyczerpania baterii.

Jak włączać i wyłączać aparaty słuchowe oraz wymieniać baterie (ciąg dalszy)

Aby wymienić baterię

- Usuń naklejkę z nowej baterii.
- Otwórz komorę baterii.
- Wyjmij zużyta baterię, pociągając ją do góry.
- Włóż nową baterię na jej miejsce.
Upewnij się, że płaska strona (oznaczona+) jest skierowana do góry.

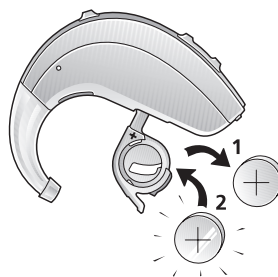

NAJLEPSZA WSKAZÓWKA:

Aby oszczędzać baterię, wyłączaj aparat słuchowy, gdy go nie używasz.



Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zeskanuj kod QR lub odwiedź nasz portal wsparcia dla pacjentów pod adresem:
danalogic.co.uk/patient-portal