

# Przycisk programowy

- Twoje aparaty słuchowe mogą mieć do 4 różnych programów. Programy można wybierać za pomocą przycisku znajdującego się z tyłu aparatów słuchowych. Przykład miejsca, w którym znajdziesz przycisk, możesz zobaczyć na obrazku tutaj.
- Aby zmienić programy, naciśnij przycisk. Liczba słyszanych sygnałów dźwiękowych wskazuje program, w którym się znajdujesz.  
1 sygnał dźwiękowy = program 1  
2 sygnały dźwiękowe = program 2 itd.
- Programy będą przechodzić w kolejności numerycznej. Na przykład program 2 będzie następował po programie 1.
- Po wyłączeniu i ponownym włączeniu aparatów słuchowych, zawsze powrócą one do programu 1.



## Zapisz swoje programy tutaj:

	Nazwa programu	Kiedy używać
Program 1		
Program 2		
Program 3		
Program 4		



Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zeskanuj kod QR lub odwiedź nasz portal wsparcia dla pacjentów pod adresem:  
**[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)**