

# ਬੈਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਟਨ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਨੱਕ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬਟਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਿਗਲ ਲਈ ਹੈ:

- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਈ 999 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।
- ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬਟਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਿਗਲ ਲਈ ਹੈ।
- ਉਸਦੇ ਵਰਗੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਗਈ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਨਾ ਦਿਓ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ A&E ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ:

- ਨਵੀਆਂ / ਸਪੇਅਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
- ਬੈਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਫਰਸ 'ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ।
- ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੋ।
- ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਿਗਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ (ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਲ-ਰੋਧਕ ਬੈਟਰੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ) ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।



ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)