

# Установка и снятие ушного вкладыша

Чтобы вставить ушной вкладыш, возьмите его большим и указательным пальцами и поместите звуковод в слуховой проход.



Протолкните ушной вкладыш в ухо, слегка прокручивая его. Убедитесь, что верхняя часть ушного вкладыша заходит за кожную складку над слуховым проходом.




После установки ушного вкладыша продвиньте слуховой аппарат вперед, а затем назад, чтобы он был удобно установлен за ухом.

Некоторым людям удобно надевать слуховой аппарат перед зеркалом; он должен сидеть плотно, но удобно.

## Установка и снятие ушного вкладыша (продолжение)

Чтобы снять слуховой аппарат, приподнимите его из-за уха и оставьте его висеть рядом с ухом.

Возьмите ушной вкладыш большим и указательным пальцами и осторожно вытащите его из уха. Иногда нужно слегка покрутить ушной вкладыш, чтобы полностью вытащить его.

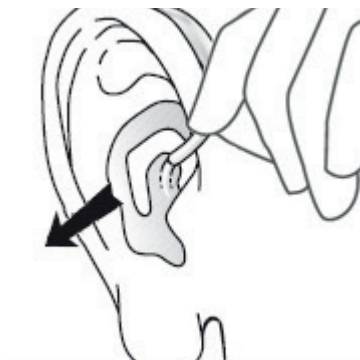

Для получения дополнительной помощи отсканируйте QR-код или зайдите на наш портал помощи пациентам:  
**[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)**