




Как заменить трубку ушного вкладыша

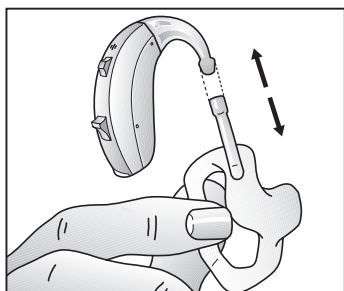


1. Отсоедините ушной вкладыш от слухового аппарата, а затем вытащите трубку из ушного вкладыша.

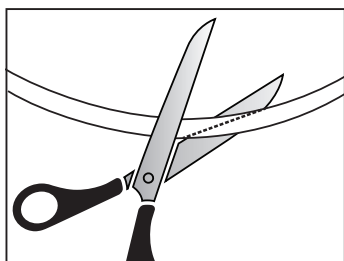

2. Отрежьте примерно последние 5 см перед изогнутой частью трубки так, чтобы образовался скошенный конец.

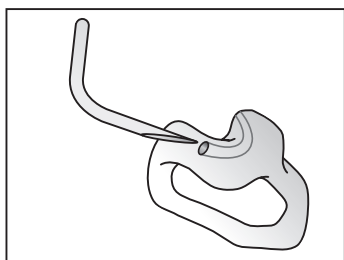


3. Пропустите заостренный конец через отверстие в ушном вкладыше снаружи, как показано на изображении, пока он не появится с другой стороны. Если в вашем ушном вкладыше два отверстия, проведите трубку через большее отверстие сверху.

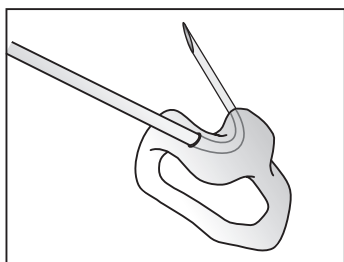


4. Проведите заостренный конец трубки через ушной вкладыш, пока другой конец трубки не займет вертикальное положение и не будет плотно прилегать ко вкладышу.


Как заменить трубку ушного вкладыша (продолжение)

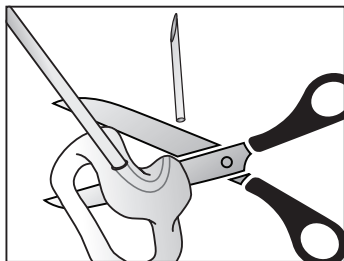

5. Обрежьте заостренный конец как можно ближе к ушному вкладышу. Убедитесь, что неровные края трубки не торчат наружу, так как это может вызвать раздражение в ушах.

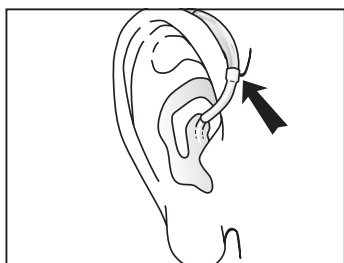

6. Теперь вам нужно отрегулировать длину трубки так, чтобы она соответствовала вашему уху. Поместите старую часть трубки (которую вы удалили ранее), рядом со вновь установленной трубкой, отмерьте и обрежьте. Или наденьте слуховой аппарат на ухо, отметьте точку, в которой оно «пересекает» слуховой аппарат, как показано на изображении, и обрежьте.

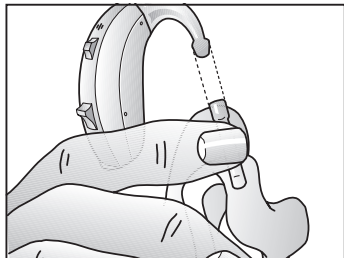

7. Чтобы снова соединить слуховой аппарат с ушным вкладышем, сожмите верхнюю часть трубки и соедините ушной вкладыш и слуховой аппарат.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ: Трубка ушного вкладыша может стать жесткой или хрупкой или поменять цвет со временем. Обычно рекомендуется менять ее по меньшей мере один раз в 6 месяцев. Если у вас возникают затруднения при смене трубки ушного вкладыша, проконсультируйтесь со своим аудиологом.



Для получения дополнительной помощи отсканируйте QR-код или зайдите на наш портал помощи пациентам:
danalogic.co.uk/patient-portal