


Чистка и замена тонкого звуковода для слуховых аппаратов Ambio и Ambio Smart

Чистка

1. Достаньте тонкий звуковод из слухового аппарата, открутив его против часовой стрелки.
2. Протрите тонкий звуковод и колпачок влажной тканью.
3. Затем вставьте чистящий стержень через верх тонкого звуковода в том месте, где он соединяется со слуховым аппаратом. Протолкните чистящий стержень по всей длине, чтобы удалить все загрязнения.

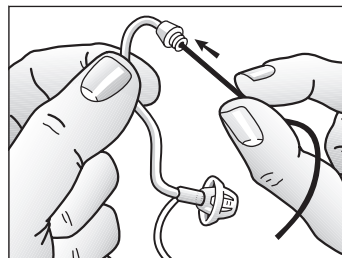


ВАЖНЫЙ СОВЕТ:

Тонкий звуковод и колпачок должны заменяться, когда становятся жесткими, хрупкими или деформируются.



Замена

1. Достаньте тонкий звуковод из слухового аппарата, открутив его против часовой стрелки.
2. Установите новый тонкий звуковод, открутив его по часовой стрелке.

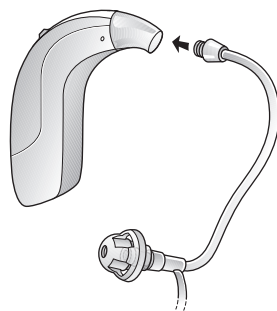

Для получения дополнительной помощи отсканируйте QR-код или зайдите на наш портал помощи пациентам:
danalogic.co.uk/patient-portal