

Безпечне поводження з батареєю

Проковтнута батарейка може завдати серйозної шкоди здоров'ю або призвести до смерті. Вони також можуть спричинити значні травми, якщо застрягнуть у носі або вусі.

Якщо ви підозрюєте, що ваша дитина або родич проковтнув гудзикову батарейку:

- Віднесіть їх до найближчого відділення невідкладної допомоги або наберіть 999, щоб викликати швидку.
- Скажіть персоналу лікарні, що ви вважаєте, що ваша дитина/родич проковтнули батарейку.
- Візьміть з собою аналогічну батарею та упаковку. Це допоможе лікарю визначити тип проковтнутої батарейки і полегшить лікування.
- Не дозволяйте дитині/родичу їсти або пити.
- Не намагайтеся змусити їх блювати.
- Ви повинні звернутися у відділення невідкладної допомоги, навіть якщо ваша дитина/родич не має ніяких симптомів.

Безпека батарейок слухових апаратів:

- Зберігайте нові/запасні батареї в оригінальній блистерній упаковці в закритому контейнері. Зберігайте їх у місцях, недоступних для дітей та вразливих дорослих.
- Відкриваючи упаковку з батарейками, слідкуйте за тим, щоб вони не впали на підлогу.
- Утилізуйте батарейки безпечно та якомога швидше.
- Батарейки іноді плутають з пігулками. Тому пацієнтам слід ретельно перевіряти свої ліки перед тим, як ковтати будь-які таблетки, а батарейки слід зберігати в окремому від ліків місці.
- Зберігайте слухові апарати (навіть ті, що оснащені блокуванням акумулятора від дітей) у місцях, недоступних для маленьких дітей та вразливих дорослих, коли вони не використовуються.



Для отримання додаткової підтримки відскануйте QR-код або відвідайте наш портал підтримки пацієнтів за посиланням:
danalogic.co.uk/patient-portal

Правильний вибір для Національної служби охорони здоров'я

danalogic GN