

زر البرامج



- قد تشمل أجهزة المساعدة السمعية على ما يصل إلى ٤ برامج مختلفة. يمكن تحديد البرامج باستخدام الزر في الجانب الخلفي من أجهزة المساعدة السمعية. تعرض الصورة في جانب الصفحة مثالاً للموضع الذي يمكنك العثور على الزر فيه.
- لتغيير البرامج، اضغط على الزر. يشير عدد أصوات الصفير التي تسمعها إلى البرنامج الذي تستخدمه حاليًا.
 - صفير واحد = البرنامج ١
 - صفيران = البرنامج ٢، وهكذا
- ستتعاقب البرامج بترتيب رقمي. على سبيل المثال: سيأتي البرنامج ٢ عقب البرنامج ١.
- عند إيقاف تشغيل أجهزة المساعدة السمعية وإعادة تشغيلها، ستعود دائمًا إلى البرنامج ١.

سجّل البرامج هنا:

اسم البرنامج	موعد الاستخدام
البرنامج ١	
البرنامج ٢	
البرنامج ٣	
البرنامج ٤	

للحصول على مزيد من الدعم، امسح ضوئيًا رمز الاستجابة السريعة QR أو تفضل بزيارة بوابتنا الإلكترونية لدعم المرضى عبر الرابط: danalogic.co.uk/patient-portal

