


# ضبط مستوى الصوت عبر المفتاح التبدلي



يتيح لك ضبط مستوى الصوت رفع مستوى صوت أجهزة المساعدة السمعية أو خفضه.

١- لرفع مستوى الصوت، اضغط على الطرف العلوي من المفتاح التبدلي.

٢- لخفض مستوى الصوت، اضغط على الطرف السفلي من المفتاح التبدلي.

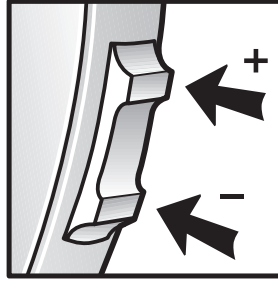

عند رفع مستوى الصوت أو خفضه، ستسمع صوت صفيير واحدًا عند كل ضغطة. عند الوصول إلى الحد الأقصى أو الأدنى لمستوى الصوت، ستسمع صوت صفيير مزدوجًا. هذه التغييرات في مستوى الصوت مؤقتة، وعندما تعيد تشغيل جهاز المساعدة السمعية التابع لك سيعود إلى مستوى الصوت المعين من قبل اختصاصي السمع المتابع لحالتك. يرجى استخدام تطبيق BeMore إذا كنت تود حفظ إعدادات ضبط مستوى الصوت هذه باستخدام ميزة "Favourite" (المفضلة).

للحصول على مزيد من الدعم، امسح ضوئيًا رمز الاستجابة السريعة QR أو تفضل بزيارة  
بوابتنا الإلكترونية لدعم المرضى عبر الرابط: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)

