

Безопасност на батериите

При поглъщане батериите тип копче могат да причинят сериозно увреждане или смърт. Те могат да причинят сериозни наранявания и ако попаднат в носа или ухото.

Ако подозирате, че Ваше дете или близък са погълнали батерия тип копче:

- Закарайте го директно в най-близкото отделение за спешна помощ или се обадете на тел. 999 за линейка.
- Информирайте болничния персонал, че смятате, че детето/ близкият Ви са погълнали батерия.
- Вземете със себе си подобна батерия и опаковката. Това ще помогне на лекаря да определи вида на погълнатата батерия и ще улесни лечението.
- Не позволявайте на детето / близкия си да яде или да пие.
- Не ги разболявайте.
- Трябва да отидете до спешното отделение дори ако детето / близкият Ви не показва никакви симптоми.

Безопасно съхранение на батериите за слуховите апарати:

- Съхранявайте новите/ резервните батерии в оригиналната им блистерна опаковка в запечатан контейнер. Съхранявайте ги извън полезрението и обсега на деца и уязвими възрастни.
- Когато отваряте опаковка с батерии, внимавайте те да не паднат на пода.
- Рециклирайте батериите безопасно и възможно най-бързо.
- Понякога батериите се объркват с хапчета. Ето защо пациентите трябва да проверяват внимателно лекарствата си, преди да поглъщат каквито и да било таблетки, а батериите трябва да се съхраняват на различно място от лекарствата.
- Съхранявайте слуховите апарати (дори снабдените с ключалки за батерии със защита от деца) извън полезрението и обсега на малки деца и уязвими възрастни, когато не се използват.



За допълнителна помощ сканирайте QR кода или посетете нашия портал за поддръжка на пациенти на адрес:
danalogic.co.uk/patient-portal