


Почистване и подмяна на тънки тръбички за Ambio и Ambio Smart


Почистване

1. Разкачете тънката тръбичка от слуховия си апарат, като я развинтите обратно на часовниковата стрелка.
2. Избършете тънката тръбичка и заобления накрайник с влажна кърпа.
3. След това вкарайте тела за почистване през горната част на тънката тръбичка, където тя се свързва към слуховия апарат. Прекарайте тела за почистване през цялата тръбичка, за да отстраните напълно евентуалните остатъци.

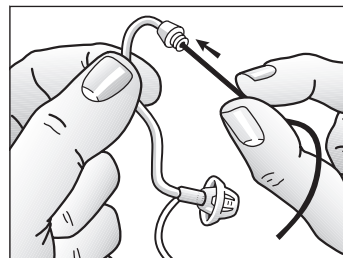

ТОП СЪВЕТ:

Тънките тръбички и заоблените накрайници трябва да се подменят, когато започнат да се втвърдяват, станат чупливи или се прегънат.

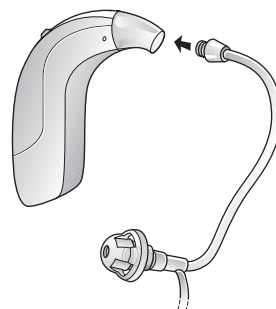

Подмяна

1. Разкачете тънката тръбичка от слуховия си апарат, като я развинтите обратно на часовниковата стрелка.
2. Свържете новата тънка тръбичка, като я завинтите по часовниковата стрелка.



За допълнителна помощ сканирайте QR кода или посетете нашия портал за поддръжка на пациенти на адрес:
danalogic.co.uk/patient-portal