


Поставяне и изваждане на шаблон за ухо

За да поставите шаблона за ухо, го хванете между палеца и показалеца и вкарайте изходния отвор за звука в ушния канал.

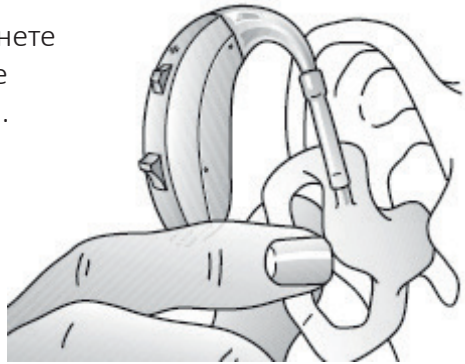

Плъзнете шаблона докрай в ухото си, като внимателно го завъртите. Уверете се, че горната част на шаблона за ухо е вмъкната зад кожната гънка над ушния Ви канал.




След като наместите шаблона за ухо, изтласкайте слуховия апарат напред и след това го плъзнете назад, за да легне удобно зад ухото Ви.

Някои хора смятат, че вкарването на шаблон за ухо става по-лесно с помощта на огледало; след като бъде наместен правилно, шаблонът трябва да приляга плътно, но удобно.

Поставяне и изваждане на шаблон за ухо (продължение)

За да извадете шаблона за ухо, вдигнете слуховия апарат иззад ухото си и го оставете да виси до ухото.

С помощта на палеца и показалеца внимателно издърпайте шаблона за ухо от ухото си. Може да се наложи леко да завъртите шаблона за ухо, за да го извадите напълно.

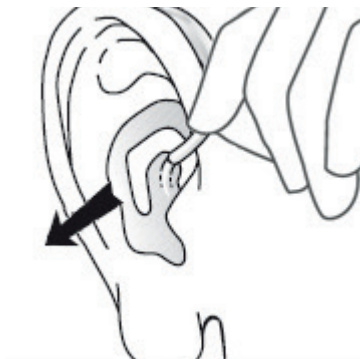

За допълнителна помощ сканирайте QR кода или посетете нашия портал за поддръжка на пациенти на адрес:
danalogic.co.uk/patient-portal