



Поставяне и изваждане на тънки тръбички


1. Започнете, като закачите слуховия апарат отгоре на ухото си.

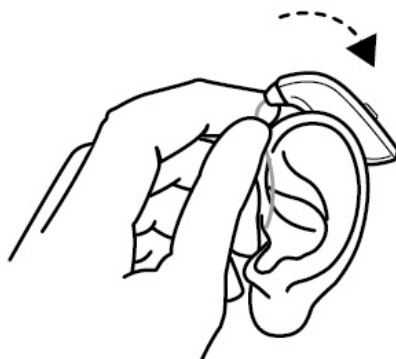

2. След това хванете тръбичката в мястото на огъване и внимателно вкарайте заобления накрайник в ушния си канал.

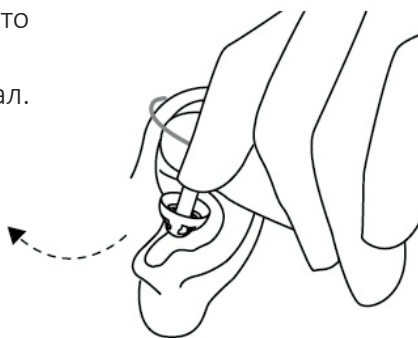

3. Вкарайте накрайника достатъчно навътре в ушния канал, така че тръбичката да прилегне плътно към главата Ви.

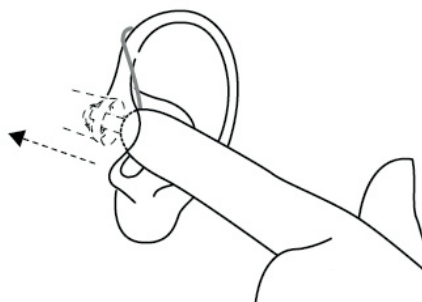


4. И накрая, всяка тръбичка има фиксиращ кабел, който трябва да се постави в ушната мида.

Поставяне и изваждане на тънки тръбички (продължение)

5. За да отстраните слуховия апарат, най-напред го извадете от ухото си.



6. След това хванете тръбичката в мястото на огъване и внимателно издърпайте заобления крайник от ушния си канал.

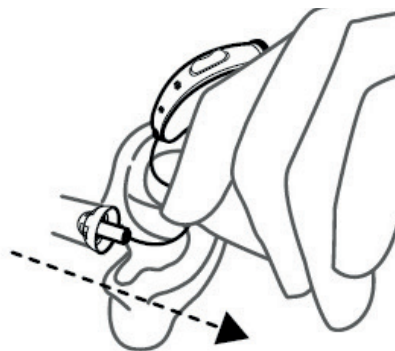

За допълнителна помощ сканирайте QR кода или посетете нашия портал за поддръжка на пациенти на адрес:
danalogic.co.uk/patient-portal