


Как да включвате и изключвате слуховите си апарати и да смените батерията

Включване

След като поставите батерия, затворете напълно капачето на отделението за батерията, за да включите слуховия си апарат.

Изключване

Отворете капачето на отделението за батерията, докато чуete щракване, за да изключите слуховия си апарат.

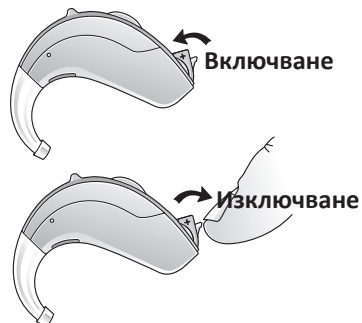

Смяна на батериите


Индикация за изтощена батерия

- Когато батерията се изтощи, слуховият апарат ще издаде бипкащ сигнал.
- Този предупредителен бипкащ сигнал ще се повтаря през 15 минути, докато батерията се изтощи напълно.

Как да включвате и изключвате слуховите си апарати и да смените батерията (продължение)

За да смените батерията

- Отлепете стикера от новата батерия.
- Отворете капачето на отделението за батерия.
- Извадете старата батерия, като я издърпате нагоре.
- Поставете новата батерия на нейното място. Уверете се, че плоската страна (маркирана със знака +) сочи нагоре.

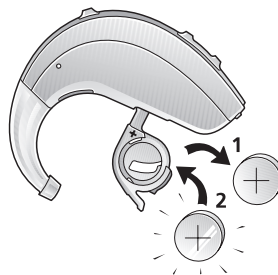

ТОП СЪВЕТ:

За да не се изтощава батерията, винаги изключвайте слуховия си апарат, когато не го използвате.



За допълнителна помощ сканирайте QR кода или посетете нашия портал за поддръжка на пациенти на адрес:
danalogic.co.uk/patient-portal