

# Zabezpečení baterie

Pokud je knoflíková baterie spolknuta, může to zapříčinit vážné zdravotní potíže nebo smrt. Pokud uvíznou v nose nebo uchu, mohou zapříčinit vážná poranění rovněž.

## **Pokud máte podezření, že vaše dítě nebo příbuzný spolkl knoflíkovou baterii:**

- Dopravte tuto osobu okamžitě na nejbližší lékařskou pohotovost nebo zavolejte sanitku.
- Sdělte nemocničnímu personálu vaše podezření, že vaše dítě/příbuzný spolkl knoflíkovou baterii.
- Vezměte s sebou podobnou baterii nebo obal baterie. Lékaři to pomůže zjistit, jaký typ baterie byl spolknut a ošetření může být snadnější.
- Nedovolte, aby vaše dítě/příbuzný jedl nebo pil.
- Nevvolávejte u nich zvracení.
- Lékařskou pohotovost musíte vyhledat i když vaše dítě/příbuzný nevykazuje žádné příznaky.

## **Jak sluchové pomůcky a baterie bezpečně přechovávat:**

- Nové/náhradní baterie přechovávejte v jejich původním obalu v uzavřeném balení. Přechovávejte je mimo dosah dětí i dospělých s hendikepem.
- Když balení baterie otevíráte, dávejte pozor, aby vám baterie nevytáhly na zem.
- Baterie recyklujte bezpečně a co možná nejdříve.
- Baterie bývají občas zaměněny za pilulky. Pacienti by proto měli pečlivě zkontrolovat své léky, než jakékoli pilulky spolknou a baterie by měly být přechovávány odděleně od léků.
- Pokud sluchové pomůcky (i ty, jež jsou vybaveny zámkem baterie) nepoužíváte, přechovávejte je mimo dosah malých dětí i dospělých s hendikepem.



Za účelem další technické pomoci naskenujte QR kód a navštivte náš portál podpory pacientů na adrese:  
**[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)**