




Jak vyměnit hadičku ušní tvarovky

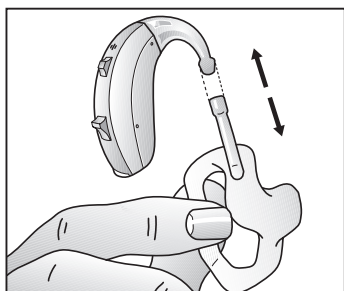


1. Odeberte tvarovku ze své sluchové pomůcky a pak vytáhněte hadičku z tvarovky.

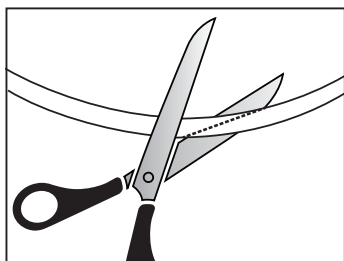

2. Odřízněte cca posledních 5 cm předem ohnutého kusu hadičky do zúženého konce.

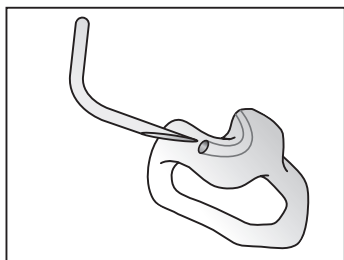


3. Špičatý konec protáhněte kanálem v tvarovce z vnější strany, jak je znázorněno na obrázku, dokud nevyleze na druhém konci. Pokud máte v tvarovce k dispozici dva otvory, protáhněte hadičku větším z nich nahore.

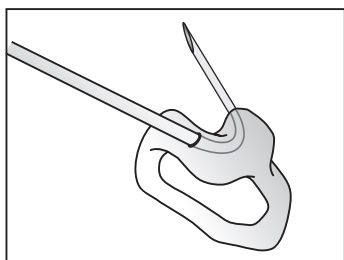


4. Protáhněte špičatý konec hadičky skrz tvarovku, dokud druhý konec hadičky nebude ve svislé poloze a nebude rovně přiléhat k tvarovce.


Jak vyměnit hadičku ušní tvarovky (pokračování)

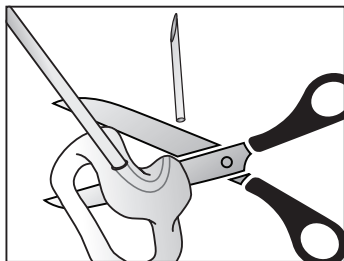

5. Odřízněte špičatý konec co nejbliže k tvarovce. Dbejte na to, aby z hadičky nevyčnívaly nerovné okraje, které by mohly způsobit podráždění ucha.

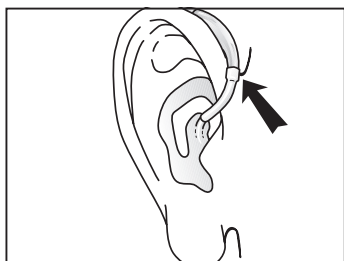

6. Nyní je třeba upravit délku hadičky tak, aby se přizpůsobila vašemu uchu. Umístěte původní kus hadičky, který jste předtím odstranili, vedle nově umístěné hadičky a odřízněte jej. Nebo nasadte sluchovou pomůcku na ucho a označte místo, kde se hadička protíná s pomůckou, jak je znázorněno na obrázku, a odřízněte.

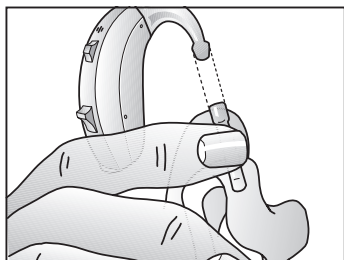

7. Chcete-li sluchovou pomůcku znovu připojit k tvarovce, stiskněte horní část hadičky a znovu spojte tvarovku a sluchovou pomůcku.

TIP: *Hadičky ušních tvarovek mohou časem ztuhnout, stát se křehkými nebo změnit barvu. Obvykle se doporučuje měnit hadičku alespoň jednou za 6 měsíců. Pokud máte při výměně hadičky jakékoli problémy, obraťte se na místního audiologa.*



Za účelem další technické pomoci naskenujte QR kód a navštivte náš portál podpory pacientů na adrese:
danalogic.co.uk/patient-portal