

Jak vaši sluchovou pomůcku zapnout a vypnout a jak vyměnit baterii

Zapnutí

Po vložení baterie zavřete zcela víčko přihrádky na baterii, abyste svou sluchovou pomůcku zapnuli.


Vypnutí

Otevřete víčko přihrádky na baterii, dokud se neozve kliknutí, abyste svou sluchovou pomůcku vypnuli.

Výměna baterie

Při nízkém stavu nabití baterie


- Vaše sluchová pomůcka pípne, pokud začne být baterie málo nabitá.
- Varovné pípnutí se ozve každých 15 minut, dokud není baterie zcela vybitá.

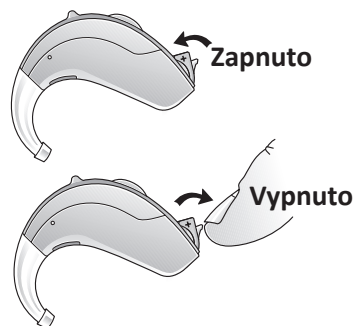

Jak vaši sluchovou pomůcku zapnout a vypnout a jak vyměnit baterii (pokračování)

Výměna baterie

- Odstraňte lepicí štítek z nové baterie.
- Otevřete víčko přihrádky na baterii.
- Vyměňte vybitou baterii vytažením směrem nahoru.
- Vložte novou baterii.
Dbejte na to, aby plochá strana (označená+) směřovala nahoru.

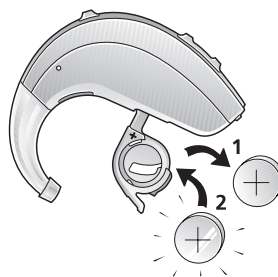

TIP:

Chcete-li šetřit baterii, nezapomeňte sluchadlo vypnout, pokud je nepoužíváte.



Za účelem další technické pomoci naskenujte QR kód a navštivte náš portál podpory pacientů na adrese: **danalogic.co.uk/patient-portal**