


# Přepínač ovládání hlasitosti

Ovládání hlasitosti umožní, aby byla hlasitost vaší sluchové pomůcky zvýšena nebo snížena,

1. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte horní konec přepínače.
2. Pro snížení hlasitosti stiskněte dolní konec přepínače.

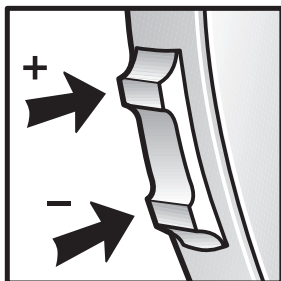

Když zvýšíte nebo snížíte hlasitost, uslyšíte při každém stisknutí pípnutí. Když dosáhnete horní nebo dolní meze rozsahu hlasitosti, uslyšíte dvojí pípnutí. Tyto změny hlasitosti jsou dočasné a když svou sluchovou pomůcku restartujete, vrátí se nastavení na výchozí hodnotu zadanou vaším audiologem. Pokud chcete uložit toto nastavení hlasitosti, používejte aplikaci BeMore pomocí prvku 'Favourite' (Oblíbené)



Za účelem další technické pomoci naskenujte QR kód a navštivte náš portál podpory pacientů na adrese:  
**[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)**