


# 清洁、更换 Ambio and Ambio Smart 的声管

## 清洁

1. 逆时针拧开助听器上的细声管。
2. 用湿抹布擦拭细声管和耳塞。
3. 现在，将清洁线穿过连接助听器的声管顶部。将清洁线完全穿过清除碎片。

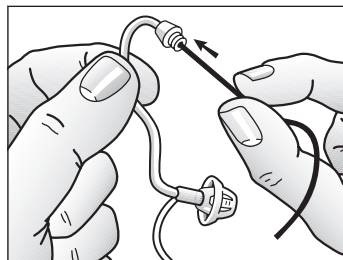


## 重要提示:

如果组件变硬、变脆或扭结，则应更换细声管和耳塞。



## 更换

1. 逆时针拧开助听器上的细声管。
2. 顺时针拧紧以安装用于替换的细声管。

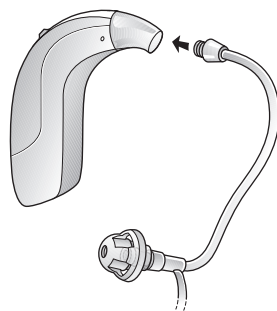

如需进一步技术支持，请扫描二维码或访问我们的患者支持门户网站：[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)