


# Regulacja głośności - przełącznik

Regulacja głośności pozwoli na zwiększenie lub zmniejszenie głośności aparatów słuchowych.

1. Aby zwiększyć głośność, naciśnij górną końcówkę przełącznika.
2. Aby zmniejszyć głośność, naciśnij dolną końcówkę przełącznika.

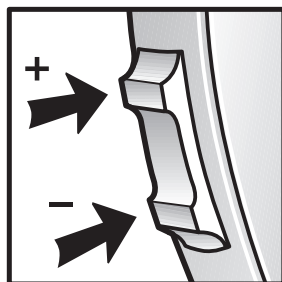

Podczas zwiększania lub zmniejszania głośności usłyszysz sygnał dźwiękowy po każdym naciśnięciu. Po osiągnięciu górnej lub dolnej granicy zakresu głośności usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy. Te zmiany głośności są tymczasowe i po ponownym uruchomieniu aparatu słuchowego powróci on do głośności ustawionej przez audiologa. Jeśli chcesz zapisać te ustawienia regulacji głośności za pomocą funkcji „Ulubione”, skorzystaj z aplikacji BeMore.



Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zeskanuj kod QR lub odwiedź nasz portal wsparcia dla pacjentów pod adresem:  
**[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)**