



# ਐਂਬਿਓ ਅਤੇ ਐਂਬਿਓ ਸਮਾਰਟ ਲਈ ਪਤਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ

## ਸਫ਼ਾਈ

1. ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਟਾਓ।
2. ਪਤਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਝੋ।
3. ਹੁਣ, ਸਫ਼ਾਈ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧੱਕੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਬਾ ਕਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਿੱਡ ਕਕ ਕਰੋ।

## ਟੈਪ ਟਿਪ:

ਜਦੋਂ ਪੁਰਜੇ ਸਖਤ, ਭੁਰਭੁਰੇ ਜਾਂ ਵੱਲ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

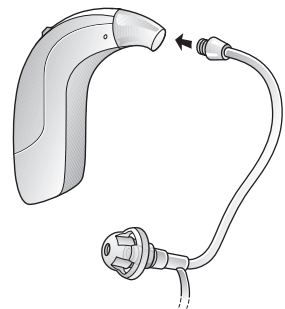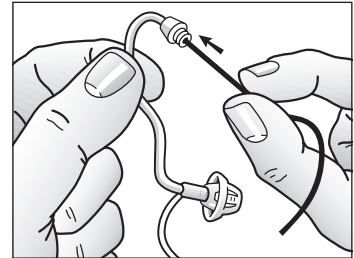

## ਬਦਲਣਾ

1. ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਟਾਓ।
2. ਪਤਲੀ ਬਦਲਵੀਂ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਗਾਓ।



ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)