

# ਆਪਣੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ

## ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ

ਬੈਟਰੀ ਪਈ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।


## ਬੰਦ ਕਰਨਾ

ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

## ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਦਲਣਾ

### ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋਏ


- ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਬੀਪ ਕਰੇਗੀ।
- ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੀਪ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

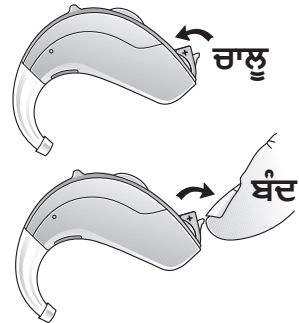

ਆਪਣੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ (ਜਾਰੀ)

### ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ

- ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਚਿਪਕਾਉ ਕਕ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
- ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹਟਾਓ।
- ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਓ।  
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਮਤਲ ਪਾਸਾ (+ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ) ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

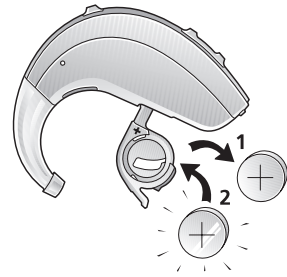

### ਟੈਪ ਟਿਪ:

ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।



ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)