

Кнопка программ

- В вашем слуховом аппарате может быть до 4 разных программ. Программы можно выбирать с помощью кнопки на задней поверхности слухового аппарата. Пример расположения кнопки показан на этом изображении.
- Нажмите на кнопку для изменения программы. Количество звуковых сигналов, которое вы услышите, означает, какую программу вы включили.
1 сигнал = Программа 1
2 сигнала = Программа 2 и т. д.



- Программы следуют друг за другом в порядке возрастания номеров. Например, программа 2 следует за программой 1.
- Когда вы выключаете слуховой аппарат и снова включаете его, он возвращается к программе 1.

Запишите свои программы здесь:

	Имя программы	Когда использовать
Программа 1		
Программа 2		
Программа 3		
Программа 4		



Для получения дополнительной помощи отсканируйте QR-код или зайдите на наш портал помощи пациентам:
danalogic.co.uk/patient-portal