

# Меры безопасности при использовании батареек

Если проглотить батарейку таблеточного типа, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем или смерти. Также могут возникнуть значительные проблемы со здоровьем, если батарейка попадет в нос или в ухо.

## Если вы подозреваете, что ваш ребенок или член вашей семьи проглотил батарейку:

- Отвезите его в ближайший пункт неотложной помощи или вызовите скорую помощь по телефону 999.
- Скажите работникам больницы, что вам кажется, что ваш ребенок / член семьи проглотил батарейку таблеточного типа.
- Возьмите с собой такую же батарейку и упаковку от нее. Это поможет врачу определить тип проглоченной батарейки и облегчит оказание помощи.
- Не давайте ребенку / члену вашей семьи есть и пить.
- Не вызывайте у него рвоту.
- Обязательно обратитесь в отделение неотложной помощи, даже если у вашего ребенка / члена семьи нет симптомов плохого самочувствия.

## Меры предосторожности при использовании батареек для слухового аппарата:

- Храните новые/запасные батарейки в оригинальной упаковке в закрытом контейнере. Храните их в месте, недоступном для детей и взрослых с ограниченными возможностями.
- При открытии упаковки с батарейками следите, чтобы они не упали на пол.
- Утилизируйте батарейки безопасным способом и как можно быстрее.
- Батарейки иногда по ошибке принимают за таблетки. Поэтому, прежде чем выпить таблетку, проверьте, что вы пьете, и не храните батарейки рядом с лекарствами.
- Держите слуховой аппарат (даже если он оборудован фиксатором батарейки для защиты от детей) в месте, недоступном для детей и взрослых с ограниченными возможностями, когда не используете его.



Для получения дополнительной помощи отсканируйте QR-код или зайдите на наш портал помощи пациентам:  
[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)