



# Установка и удаление тонкого звуковода


1. Наденьте слуховой аппарат на ухо.

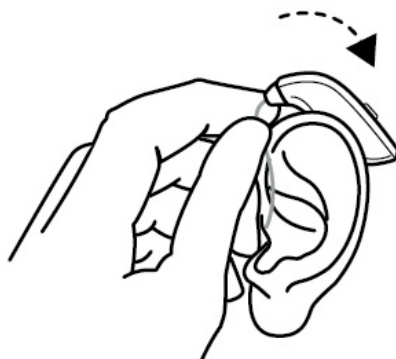

2. Затем возьмите звуковод в месте сгиба и осторожно вставьте колпачок в слуховой проход.

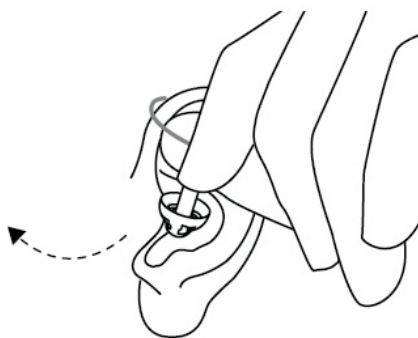

3. Протолкните колпачок подальше в слуховой проход, чтобы звуковод был установлен вплотную.

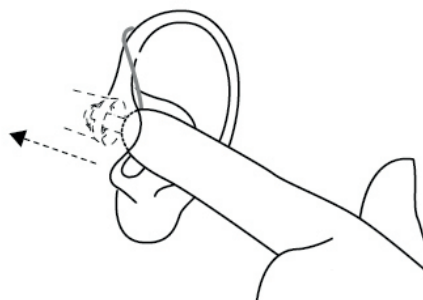


4. Наконец, на каждом звуководе есть фиксатор, который должен быть помещен в ушную раковину.

## Установка и удаление тонкого звуковода (продолжение)

5. Для снятия слухового аппарата сначала приподнимите слуховой аппарат над ухом.



6. Затем возьмите звуковод в месте сгиба и осторожно вытащите его из слухового прохода.

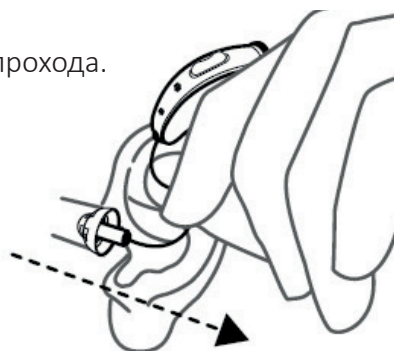

Для получения дополнительной помощи отсканируйте QR-код или зайдите на наш портал помощи пациентам:  
[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)