


Включение и выключение слухового аппарата и замена батареек

Включение

Когда батарейка установлена, полностью закройте крышку батарейного отсека, чтобы включить слуховой аппарат.

Выключение

Чтобы выключить слуховой аппарат, откройте крышку батарейного отсека, чтобы раздался щелчок.

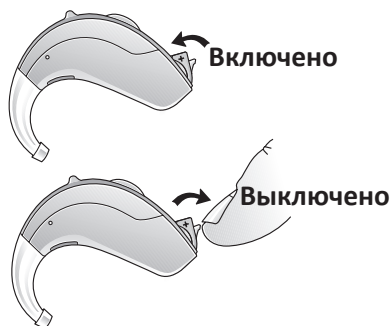

Замена батареек


Когда уровень заряда батарейки низкий

- Когда батарейка начинает разряжаться, слуховой аппарат издает звуковой сигнал.
- Этот предупреждающий сигнал будет повторяться каждые 15 минут, пока батарейка полностью не разрядится.

Включение и выключение слухового аппарата и замена батареек (продолжение)

Замена батареек

- Снимите этикетку-наклейку с новой батарейки.
- Откройте крышку батарейного отсека.
- Удалите использованную батарейку, потянув ее вверх.
- Вставьте новую батарейку на ее место. Убедитесь, что плоская сторона (со знаком +) смотрит наверх.

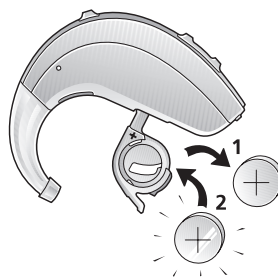

ВАЖНЫЙ СОВЕТ:

Для экономии заряда батарейки отключайте слуховой аппарат, когда не используете его.



Для получения дополнительной помощи отсканируйте QR-код или зайдите на наш портал помощи пациентам:
danalogic.co.uk/patient-portal