


# Очищення та заміна тонких трубок для Ambio та Ambio Smart

## Очищення

1. Вийміть тонку трубку зі слухового апарату, відкрутивши її проти годинникової стрілки.
2. Протріть тонку трубку і купол вологою ганчіркою.
3. Тепер просуньте дріт для чищення через верхню частину тонкої трубки, де вона з'єднується зі слуховим апаратом. Протягніть дріт для чищення до кінця, щоб повністю видалити будь-яке сміття.


### ПОРАДА:

*Тонкі трубки і куполи слід замінювати, коли компоненти стають жорсткими, крижкими або перекрученими.*

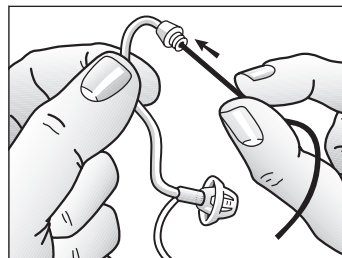

## Заміна

1. Вийміть тонку трубку зі слухового апарату, відкрутивши її проти годинникової стрілки.
2. Приєднайте змінну тонку трубку, закручуючи її за годинниковою стрілкою.

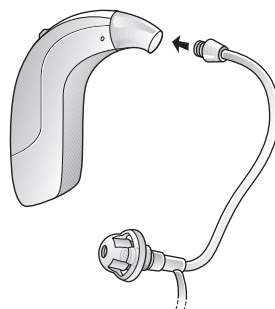

Для отримання додаткової підтримки відскануйте QR-код або відвідайте наш портал підтримки пацієнтів за посиланням:  
**[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)**

Правильний вибір для Національної  
служби охорони здоров'я

UK 02.09 E 9.2022

**danalogic** GN