



Вставлення та виймання тонких трубок


1. Почніть з розміщення слухового апарату над верхньою частиною вуха.

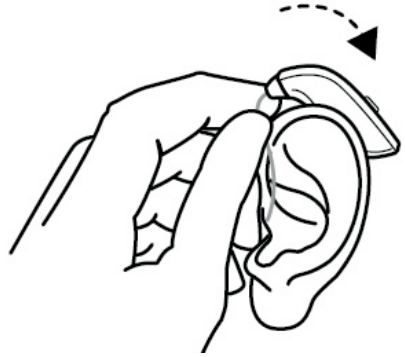

2. Потім візьміть трубку там, де вона згинається, і обережно просуньте куполоподібний вкладиш у вушний канал.

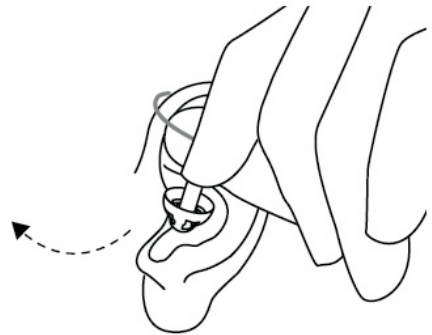

3. Просуньте куполоподібний вкладиш у вушний канал так, щоб трубка щільно прилягала до голови.

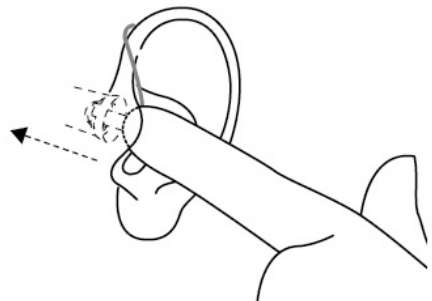


4. Нарешті, на кожній трубці є фіксуючий тросик, який слід вставити у вушну раковину.

Вставлення та виймання тонких трубок (продовження)

- Щоб зняти слуховий апарат, спочатку витягніть його з вуха.



- Потім візьміть трубку там, де вона згинається, і обережно витягніть її з вушного каналу.

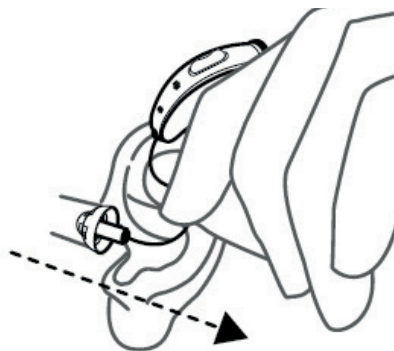

Для отримання додаткової підтримки відскануйте QR-код або відвідайте наш портал підтримки пацієнтів за посиланням:
danalogic.co.uk/patient-portal

Правильний вибір для Національної
служби охорони здоров'я

UK 08.34 D 9.2022

danalogic GN