




# Як замінити трубку у вушному вкладиші

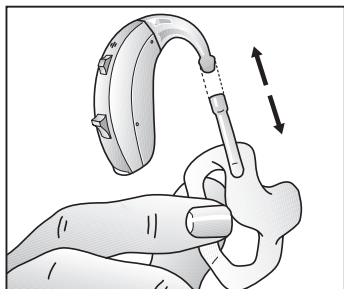


1. Зніміть вушний вкладиш зі слухового апарату, а потім витягніть трубку з вушного вкладиша.

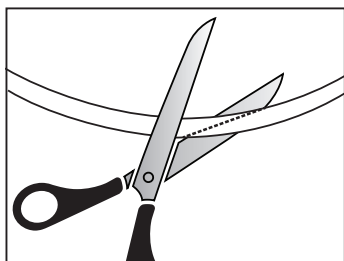

2. Відріжте приблизно останні 5 см попередньо зігнутого шматка трубки до кінцевого кінця.

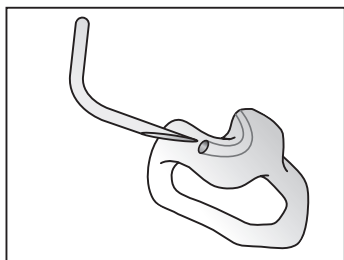


3. Протягніть загострений кінець через отвір у вушному вкладиші ззовні, як показано на малюнку, доки він не вийде з іншого кінця. Якщо у вашому вкладиші два отвори, просуньте трубку через більший отвір зверху.

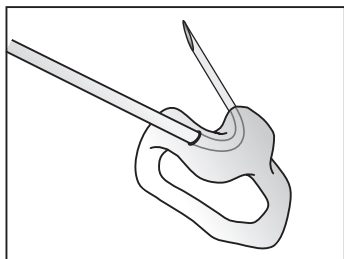


4. Протягніть загострений кінець трубки через вкладиш, доки інший кінець трубки не стане вертикально і не приляже до вкладиша.


## Як замінити трубку у вушному вкладиші (продовження)

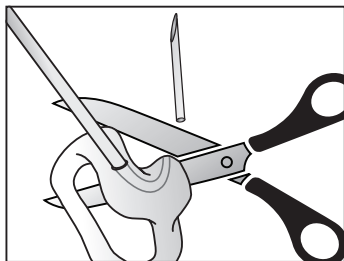

5. Відріжте загострений кінець якомога ближче до вушного вкладиша. Зробіть так, щоб не залишилося шорстких країв трубки, що стирчать назовні, оскільки це може спричинити подразнення у вусі.

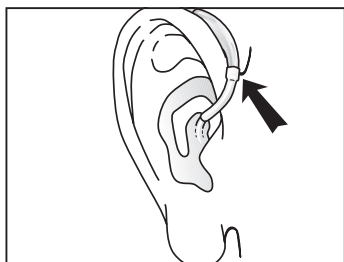

6. Тепер вам потрібно відрегулювати довжину трубки відповідно до вашого вуха. Покладіть старий шматок трубки (який ви зняли раніше) поряд з новою трубкою, виміряйте і відріжте. Або прикладіть слуховий апарат до вуха, відмітьте місце перетину трубки зі слуховим апаратом, як показано на малюнку, і відріжте її.

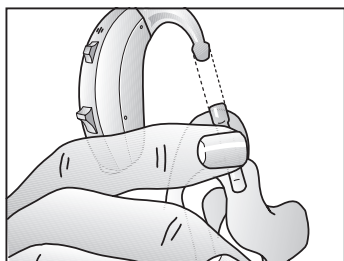

7. Щоб знову приєднати слуховий апарат до вкладиша, стисніть верхню частину трубки і з'єднайте вкладиш і слуховий апарат разом.

**ПОРАДА:** *Із часом трубка вкладиша може стати жорсткою, крихкою або знебарвленою. Зазвичай рекомендується міняти її щонайменше раз на 6 місяців. Якщо у вас виникли проблеми зі зміною вкладиша, зверніться до місцевого відділення аудіології.*



Для отримання додаткової підтримки відскануйте QR-код або відвідайте наш портал підтримки пацієнтів за посиланням:  
**[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)**