


Як вмикати та вимикати слухові апарати, а також замінювати батарею

Увімкнення

Після встановлення батарейки повністю закрийте кришку батарейного відсіку, щоб увімкнути слуховий апарат.

Вимкнення

Відкривайте кришку батарейного відсіку до клацання, щоб вимкнути слухові апарати.

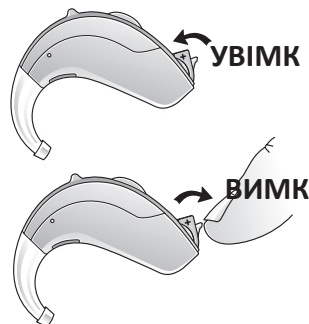

Заміна елементів живлення


Коли заряд акумулятора низький

- Ваші слухові апарати подаватимуть звуковий сигнал, коли батарея починає розряджатися.
- Цей попереджувальний звуковий сигнал повторюватиметься кожні 15 хвилин, доки батарея повністю не розрядиться.

Як вмикати та вимикати слухові апарати, а також замінювати батарею (продовження)

Щоб замінити батарейку

- Зніміть липку етикетку з нової батареї.
- Відкрийте дверцята батарейного відсіку.
- Вийміть використану батарейку, потягнувши її вгору.
- Вставте нову батарейку на місце. Переконайтеся, що плоска сторона (позначена +) спрямована вгору.

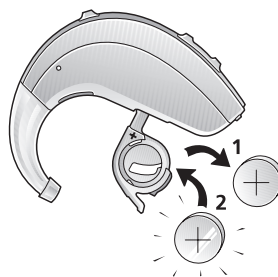

ПОРАДА:

Щоб заощадити заряд акумулятора, обов'язково вимикайте слуховий апарат, коли не користуєтеся ним.



Для отримання додаткової підтримки відскануйте QR-код або відвідайте наш портал підтримки пацієнтів за посиланням:
danalogic.co.uk/patient-portal

Правильний вибір для Національної
служби охорони здоров'я

UK 06.49 C 9.2022

danalogic GN