


# Регулювання гучності - перемикач

Регулятор гучності дозволить збільшити або зменшити гучність вашого слухового апарату.

1. Щоб збільшити гучність, натисніть на верхній кінець перемикача.
2. Щоб зменшити гучність, натисніть на нижній кінець перемикача.

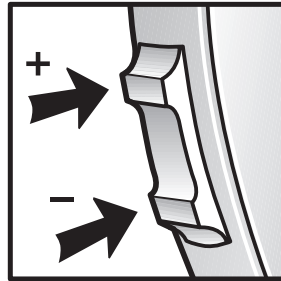

Коли ви збільшуєте або зменшуєте гучність, ви почуєте звуковий сигнал при кожному натисканні. Коли ви досягнете верхньої або нижньої межі діапазону гучності, ви почуєте подвійний звуковий сигнал. Ці зміни гучності є тимчасовими, і коли ви перезавантажите слуховий апарат, він повернеться до гучності, встановленої вашим лікарем-аудіологом. Якщо ви хочете зберегти ці налаштування гучності за допомогою функції «Вибране», скористайтеся додатком BeMore.



Для отримання додаткової підтримки відскануйте QR-код або відвідайте наш портал підтримки пацієнтів за посиланням:  
**[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)**

Правильний вибір для Національної  
служби охорони здоров'я

UK 05.61 C 9.2022

**danalogic** GN