

# بیٹری کی حفاظت

اگر نکل لی جائے، تو بٹن نما بیٹریز سنگین نقصان یا موت کا باعث بن سکتی ہیں۔ ناک یا کان میں پھنس جانے کی صورت میں یہ شدید نوعیت کی چوٹوں کا باعث بن سکتی ہیں۔

اگر آپ کو شبہ ہے کہ آپ کے بچے یا رشتے دار نے بیٹری نکل لی ہے تو:

- انہیں فوراً قریبی شعبہ حادثات میں لے جائیں یا ایمبولینس کے لیے 999 ڈائل کریں۔
- ہسپتال کے عملے کو بتائیں کہ آپ کو لگ رہا کہ آپ کے بچے/رشتے دار نے بٹن نما بیٹری نکل لی ہے۔
- ویسی بیٹری اور اس کی پیکجنگ ساتھ لے کر جائیں۔ اس سے ڈاکٹر کو نگلی جانے والی بیٹری کی قسم کا اندازہ کرنے میں مدد ملے گی اور علاج کرنے میں آسانی رہے گی۔
- اپنے بچے/رشتے دار کو کچھ کھانے یا پینے نہیں دیں۔
- انہیں بیمار پڑنے نہ دیں۔
- آپ کو اس صورت A&E لازمی جانا چاہیئے کہ اگر آپ کا بچہ/رشتے دار کوئی علامات ظاہر نہ کر رہا ہو۔
- آلہ سماعت کی بیٹریز کو محفوظ رکھنا: نئی/اضافی بیٹریز کو اپنی اصل بلیسٹر پیکجنگ میں ہوا بند ڈبے میں محفوظ رکھیں۔ انہیں بچوں اور زد پذیر بالغان کی نظروں اور پہنچ سے دور رکھیں۔
- جب بیٹری پیکج کھولیں، تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ فرش پر نہ گر جائیں۔
- بیٹریز محفوظ طریقے سے اور ممکنہ حد تک جلد ری سائیکل کریں۔
- بیٹریاں اکثر اوقات بھول چوک سے دوائیوں کی گولیاں سمجھ لی جاتی ہیں۔ لہذا، مریضوں کو کوئی بھی دوا نگلنے سے قبل اپنی دوائیوں کو اچھی طرح سے چیک کرنا چاہیئے، اور بیٹریز کو ادویات سے الگ جگہ پر رکھنا چاہیئے۔
- جب استعمال میں نہ ہوں، تو آلہ سماعت (بیشک چائلڈ پروف بیٹری لاکس کے ساتھ فٹ بھی ہوں) کو چھوٹے بچوں اور زد پذیر بالغ افراد کی نظروں اور پہنچ سے دور رکھا جائے۔

مزید معاونت کے لیے، QR کوڈ اسکین کریں یا درج ذیل ویب سائٹ پر ہمارا معاونتی پورٹل برائے مریض ملاحظہ کریں: [danalogic.co.uk/patient-portal](http://danalogic.co.uk/patient-portal)

