


# Ambio اور Ambio Smart کے لیے پتلی ٹیوب کی صفائی اور تبدیلی

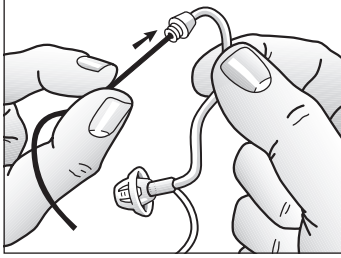

## صفائی کرنا

1. اپنے آلہ سماعت سے پتلی ٹیوب اتارنے کے لیے اسے مخالف سمت گھما کر ڈھیلا کریں۔

2. پتلی ٹیوب اور گنبد نما پلگ کو گیلے کپڑے کی مدد سے صاف کریں۔

3. اب، پتلی ٹیوب کا اوپری سرا جو آلہ سماعت سے منسلک ہوتا ہے وہاں تک صفائی والی تار دھکیلیں۔ صفائی والی تار کو ٹیوب میں مکمل طرح بلا جلا کر پروٹیں تاکہ اس میں موجود کوئی بھی گرد و غبار مکمل طرح نکل جائے۔



## اہم تجویز:

پتلی ٹیوب اور گنبد نما پلگ تبدیل کیے جانے چاہئیں جب یہ اجزاء اکڑ جائیں، کھدے یا ٹوٹنے والے ہو جائیں۔

## تبدیلی کرنا

1. اپنے آلہ سماعت سے پتلی ٹیوب اتارنے کے لیے اسے مخالف سمت گھما کر ڈھیلا کریں۔

2. نئی یا متبادل پتلی ٹیوب گھڑی کی سمت گھما کر چڑھائیں۔

مزید معاونت کے لیے، QR کوڈ اسکین کریں یا درج ذیل ویب سائٹ پر ہمارا معاونتی پورٹل برائے مریض ملاحظہ کریں: [danalogic.co.uk/patient-portal](http://danalogic.co.uk/patient-portal)

