


اپنے آلہ سماعت کو کیسے آن اور آف کریں اور اس کی بیٹری کیسے تبدیل کریں

آن کرنا

جب بیٹری ڈال دی جائے، تو بیٹری کا خانہ اچھی طرح سے بند کریں تاکہ آلہ سماعت آن ہو جائے۔

آف کرنا

بیٹری کا حصہ کھولیں کہ کلک سی محسوس ہو جس سے ظاہر ہو کہ آپ کا آلہ سماعت بند ہو گیا ہے۔

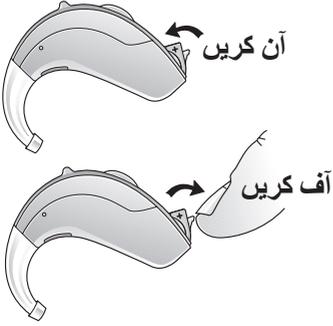

بیٹریز تبدیل کرنا

جب بیٹری پاور کم ہو

- جب آپ کی بیٹری کی پاور کم ہو رہی ہو تو آپ کا آلہ سماعت بیپ بجائے گا۔
- یہ انتباہی بیپ ہر 15 منٹ کے وقفے سے دوبرائی جائے گی ماسوائے یہ کہ بیٹری بالکل ہی ختم ہو جائے۔

اپنے آلہ سماعت کو کیسے آن اور آف کریں اور اس کی بیٹری کیسے تبدیل کریں
(گزشتہ سے پیوستہ)



بیٹری تبدیل کرنے کے لیے

- نئی بیٹری سے اسٹیکر لیبل اتاریں۔
- بیٹری کا خانہ کھولیں۔
- استعمال شدہ بیٹری کو اوپر کی جانب کھینچ کر ہٹائیں۔
- نئی بیٹری کو اس کی جگہ پر ڈالیں۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کی ہموار سطح (+نشان زدہ) اوپر کی جانب ہو۔

اہم تجویز:

بیٹری کی بچت کے لیے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جب آلہ سماعت استعمال نہ کر رہے ہوں تو اس کو بند کر دیں۔

مزید معاونت کے لیے، QR کوڈ اسکین کریں یا درج ذیل ویب سائٹ پر ہمارا معاونتی پورٹل برائے مریض ملاحظہ کریں: danalogic.co.uk/patient-portal

