

پروگرام کے بٹن



پروگرام کے بٹن

- آپ کے آلہ سماعت میں 4 مختلف پروگرامز ہو سکتے ہیں۔ آلہ سماعت کے مخالف سمت موجود بٹن کا استعمال کر کے پروگرامز منتخب کیے جا سکتے ہیں۔ بٹن کہاں ہوتے ہیں اس کی مثال کے لیے یہاں تصویر ملاحظہ کریں۔
- پروگرامز کی تبدیلی کے لیے، بٹن دبائیں۔ سنائی دی جانے والی بیپس کی تعداد سے پتا چلتا ہے کہ آپ کون سے پروگرام پر ہیں۔
- 1 بیپ = پروگرام 1
2 بیپس = پروگرام 2، وغیرہ۔
- پروگرام عددی ترتیب میں چلیں گے۔ مثال کے طور پر، پروگرام 2 پروگرام 1 کے بعد آئے گا۔
- آپ جب بھی اپنا آلہ سماعت بند کر کے آن کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ پروگرام 1 پر واپس آ جاتے ہیں۔

اپنے پروگرام کا یہاں ریکارڈ کریں:

کب استعمال کرنا ہے	پروگرام کا نام
	پروگرام 1
	پروگرام 2
	پروگرام 3
	پروگرام 4

مزید معاونت کے لیے، QR کوڈ اسکین کریں یا درج ذیل ویب سائٹ پر ہمارا معاونتی پورٹل برائے مریض ملاحظہ کریں: danalogic.co.uk/patient-portal

