


# والیوم کنٹرول – ٹوگل

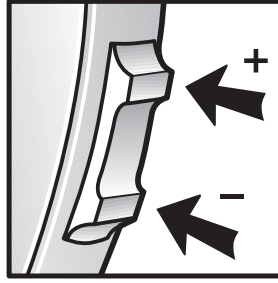

آپ والیوم کنٹرول استعمال کرتے ہوئے اپنے آلات سماعت کے والیوم کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں۔

1. والیوم بڑھانے کے لیے، ٹوگل کے اوپری حصے کو دبائیں۔
2. والیوم کم کرنے کے لیے، ٹوگل کے نچلے حصے کو دبائیں۔



جب آپ والیوم زیادہ یا کم کرتے ہیں تو آپ کو ہر دباؤ کے ساتھ بیپ سنائی دے گی۔ جب آپ والیوم کی انتہائی بلند یا کم تر سطح پر ہوں گے تو آپ کو دو مرتبہ بیپ سنائی دے گی۔ یہ والیوم کی تبدیلی عارضی ہیں اور جب آپ اپنا آلہ سماعت دوبارہ ری سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آڈیولوجسٹ کے مقرر کردہ والیوم سے ہی آن ہو گا۔ اگر آپ والیوم کنٹرول کی ترتیبات محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم BeMore ایپ استعمال کر کے 'پسندیدہ' خصوصیت کا استعمال کریں۔

مزید معاونت کے لیے، QR کوڈ اسکین کریں یا درج ذیل ویب سائٹ پر ہمارا معاونتی پورٹل برائے مریض ملاحظہ کریں: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)

