

# نقص کی ازالہ کاری کی گائیڈ

علامت	سبب	ممکنہ تدبیر
آواز کا نہ آنا	• آلہ سماعت کا آن نہ ہونا	• آلہ سماعت کا بیٹری والا خانہ کھول اور بند کر کے اس کو ری سٹارٹ کریں
	• ناکارا بیٹری	• بیٹری کی تبدیلی
	• بیٹری کا خانہ ٹھیک طریقے سے بند نہ کیا جائے	• دیکھیں کہ آیا بیٹری ٹھیک طریقے سے رکھی گئی ہے اور بیٹری کا خانہ ٹھیک طرح سے بند کیا گیا ہے
	• پتلی ٹیوب / اینر مولڈ کا بند ہو جانا	• پتلی ٹیوب / اینر مولڈ کی صفائی کریں
	• اینر مولڈ کی ٹیوب کی پانی کی وجہ سے بندش	• اپنے آلہ سماعت سے اینر مولڈ الگ کریں اور اینر مولڈ کو ہلائیں تاکہ کسی قسم کا پانی نکل جائے۔ اینر مولڈ کو اپنے آلہ سماعت کے ساتھ دوبارہ جوڑنے سے قبل گرم خشک جگہ پر 15 منٹ کے لیے رکھیں
ٹھیک اونچی آواز نہیں آتی	• پتلی ٹیوب / اینر مولڈ کو غلط طریقے سے لگانا	• اپنی پتلی ٹیوب / اینر مولڈ کو دوبارہ لگائیں
	• پتلی ٹیوب / اینر مولڈ / گنبد نما پلگ کا بند ہو جانا	• اپنی پتلی ٹیوب / اینر مولڈ صاف کریں / گنبد نما پلگ تبدیل کریں
	• مسدود کردہ ویکس فلٹر	• ویکس فلٹر تبدیل کریں
	• آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سنائی میں تبدیلی آئی ہے	• اپنے مقامی شعبہ آڈیولوجی سے رابطہ کریں
	• کان میں ویکس کا زیادہ جمع ہونا	• اپنے GP یا پریکٹس نرس سے رابطہ کریں
	• آواز کا والیوم کم مقدار پر سیٹ ہونا	• آلہ سماعت کے بٹن کو دبا کر / اوپر نیچے کر کے والیوم بڑھائیں یا BeMore ایپ کا استعمال کر کے ایڈجسٹ کریں

## نقص کی ازالہ کاری کی گائیڈ (گزشتہ سے پیوستہ)

علامت	سبب	ممکنہ تدبیر
بہت زیادہ سیٹیاں بچنا / فیڈبیک	<ul style="list-style-type: none"> <li>پتلی ٹیوب / ایئر مولڈ کی غلط فٹنگ</li> <li>کان میں ویکس کا زیادہ جمع ہونا</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>پتلی ٹیوب / ایئر مولڈ کو دوبارہ لگائیں</li> <li>اپنے GP یا پریکٹس نرس سے رابطہ کریں</li> </ul>
آواز کا خراب / واضح نہ ہونا	<ul style="list-style-type: none"> <li>کمزور بیٹری</li> <li>ایئر مولڈ یا گنبد نما پلگ کو غلط لگانا</li> <li>آلہ سماعت خراب ہو گیا ہے</li> <li>آلہ سماعت کی ترتیبات ٹھیک نہیں ہیں</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>پتلی ٹیوب / ایئر مولڈ کی ٹیوب کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا یا خراب ہو جانا</li> <li>پتلی ٹیوب تبدیل کریں / ایئر مولڈ کی ٹیوب تبدیل کریں</li> <li>بیٹری کی تبدیلی</li> <li>اپنے مقامی شعبہ آڈیولوجی سے رابطہ کریں</li> <li>اپنے مقامی شعبہ آڈیولوجی سے رابطہ کریں</li> <li>اپنے مقامی شعبہ آڈیولوجی سے رابطہ کریں</li> </ul>

اگر کوئی ایسے مسائل درپیش ہیں جو یہاں مذکور نہیں کیے گئے، تو براہ کرم اپنے مقامی شعبہ آڈیولوجی سے رابطہ کریں۔

مزید معاونت کے لیے، QR کوڈ اسکین کریں یا درج ذیل ویب سائٹ پر ہمارا معاونتی پورٹل برائے مریض ملاحظہ کریں: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)

