danalogic GN

danalogic Extend

Vaše nová sluchová pomůcka s Bluetooth[®] Low Energy Audio



Vaše nové sluchové pomůcky danalogic Extend, naše první řada NHS, která zahrnuje zcela nový protokol Bluetooth[®] Low Energy Audio (Bluetooth s nízkou spotřebou energie)

Bluetooth LE Audio byl vyvinut v spolupráci s odvětvím spotřební elektroniky a výrobci sluchových pomůcek. Bluetooth LE Audio je optimalizováno pro nízkou spotřebu energie, vysokou kvalitu zvuku a velmi nízkou latenci. S Bluetooth LE Audio bude možné navázat přímé spojení mezi televizí, notebookem nebo jiným zařízením kompatibilním s Bluetooth 5.3 a sluchovou pomůckou. danalogic Extend má tento nový protokol zabudovaný ve výchozím nastavení a může se připojit také k vysílacím streamům Auracast. To znamená, že se pro pacienty jedná o skutečně nadčasové řešení, pokud jde o konektivitu.

Vše bez nutnosti dalšího zařízení k připojení jednotek. Díky technologii Bluetooth Low Energy můžete streamovat celý den a přitom šetřit baterii.

Seznam kompatibilních chytrých zařízení je k dispozici zde www.danalogic.co.uk/connectivity

Danalogic Extend také podporuje hands-free hovory s vybranými zařízeními Apple[®]. Hands-free volání vám umožňuje přijímat telefonní hovory pomocí vašich sluchových pomůcek a ty budou fungovat jako mikrofon pro zachycení vašeho hlasu, stejně jako pro přenos zvuku z vašeho telefonu přímo do ní. Pokud je o tuto vlastnost, seznam kompatibilních zařízení Apple je k dispozici zde

www.danalogic.co.uk/connectivity

Výhody sluchových pomůcek s Bluetooth Low Energy

- Telefonování se sluchovou pomůckou může být složité. Vaše nové sluchové pomůcky umožňují přímé streamování telefonních hovorů i videohovorů. Díky tomu lépe uslyšíte, co se říká.
- Už nepotřebujete sluchové pomůcky pro poslech hudby, videí nebo jiného zvuku z vašeho chytrého zařízení, protože zvuk je přenášen přímo do sluchových pomůcek.

Připojení vaší sluchové pomůcky pro streamování pomocí Bluetooth



Pokud máte kompatibilní chytré zařízení, postupujte podle pokynů v této brožuře, abyste k němu připojili svou sluchovou pomůcku.



Jak spárovat vaši sluchovou pomůcku se vaším zařízením Apple

- 1. Vypněte svou sluchovou pomůcku.
- Spusťte Bluetooth tak, že přejdete na vašem zařízení Apple do nabídky "Nastavení". Když aktivujete Bluetooth, slider zezelená.
- Jděte zpět do hlavní nabídky Nastavení a klikněte na "Zpřístupnění".
- 4. Sjeďte dolů na "Sluchadla".
- Pokud je vaše sluchová pomůcka již zapnuta, restartujte ji. V opačném případě sluchovou pomůcku zapněte. Tak zajistíte, že vaše zařízení Apple může detekovat vaši sluchovou pomůcku.





14:05 ⋪	all 🕈 🔳)	
Kenter Stress Control		
LP's Hearing Aids danalogic AM798-DWT	R 💷	
Stream to right hearing device		
Stream to left hearing device		
MICR L R Bluetooth Pairing Request *LP's Hearing Aids' would like to pair with your iPhone. Cancel Pair	T T	
Treble	0	
Bass	0	
Forget this device		

- Klikněte na "Spárovat". Pokud máte dvě sluchové pomůcky, bude zapotřebí přijmout zařízení dvakrát.
- 2. Jděte do App Store a hledejte "BeMore".
- Stáhněte si aplikaci BeMore. Otevřete ji a klikněte na "Otevřít".
- Řiďte se pokyny na obrazovce, abyste se připojili k aplikaci. Teď je vše připraveno.



POZNÁMKA: Tyto kroky platí pro verzi iOS 13 a novější

Pokud je zapotřebí opětovně spárovat zařízení Apple

Pokud byla jedna či obě vaše sluchové pomůcky vyměněny, bude zapotřebí je znovu spárovat s vaším chytrým zařízením.

- Začněte tím, že odpojíte starou sluchovou pomůcku tak, ž přejdete do menu "Nastavení".
- 2. Sjeďte dolů a zvolte "Zpřístupnění".
- 3. Zvolte "Sluchadla".
- Zvolte na obrazovce v sekci "MFI sluchadla" sluchovou pomůcku a klikněte na "Ignorovat toto zařízení".
- Restartujte svou novou sluchovou pomůcku a stiskněte "Spárovat". Pokud nosíte dvě sluchové pomůcky, budete muset kliknout na "Spárovat" dvakrát.

14:04 -	7	, 11 🗢 🔳
< Settin	ags Accessibility	
PHYS	ICAL AND MOTOR	
	Touch	>
(v)	Face ID & Attention	>
88	Switch Control	Off >
Ø	Voice Control	Off >
€	Side Button	>
	Apple TV Remote	>
	Keyboards	>
R	AirPods	>
HEAR	ING	
9	Hearing Devices	>
اللازم	Sound Recognition	Off >
	Audio/Visual	>
P	Subtitles & Captioning	>
GENE	RAL	
	Guided Access	Off >
Ì	Accessibility Shortcut	Off >

Jak si dopřát hands-free hovory s danalogic Extend pro iPhone[®] a iPad[®]

Zkontrolujte prosím, zda je vaše zařízení kompatibilní, na našich webových stránkách www.danalogic.co.uk/connectivity

Funkce	Postup	TLAČÍTKO SLUCHOVÉ POMŮCKY
Přijetí hovoru	Krátce stiskněte tlačítko na sluchové pomůcce nebo posuňte prstem na iPhonu/iPadu pro přijetí hovoru	
Ukončení hovoru	Stiskněte a podržte tlačítko na sluchové pomůcce po dobu několika sekund pro ukončení hovoru. Hovor případně můžete ukončit klepnutím na červené tlačítko na obrazovce	
Druhý příchozí hovor	Pokud jste uprostřed hovoru a přichází druhý hovor, odmítněte ho dlouhým stiskem tlačítka na sluchové pomůcce nebo klepnutím na "Odmítnout" na obrazovce iPhonu nebo iPadu	
Změna hlasitosti	Použijte tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti na iPhonu nebo iPadu	
Vypnutí hands- free hovorů v nastavení sluchové pomůcky v iOS	Třikrát stiskněte tlačítko na iPhonu pro přístup k nastavení sluchové pomůcky v iOS (přístup můžete získat také přes Ovládací centrum). Vyberte "Možnosti vstupu", následně "Vypnout"	



Pro přístup k instruktážnímu videu naskenujte QR kód nebo navštivte: danalogic.co.uk/patient-portal

Jak spárovat vaši sluchovou pomůcku se vaším zařízením Android™

- 1. Jděte do Google Play Store, vyhledejte "BeMore" a aplikaci si stáhněte.
- 2. Jakmile ji máte staženu, otevřete ji a klikněte na "Otevřít".
- 3. Řiďte se pokyny na obrazovce, abyste se připojili k aplikaci. Teď je vše připraveno.



14:12		\$\$, ♥⊿ ∎8:	2%
	Getting connected	d i	×
().	-0-	5)	
0	•	U	
Conn	ecting your heari	ng aids	
Pair wit	h Dave's Hearing	?	
Allow	access to your contacts	and call histor	y
	Can	icel Pair	

Pokud je zapotřebí znovu spárovat vaše zařízení Android

Pokud byla jedna či obě vaše sluchové pomůcky vyměněny, bude zapotřebí je znovu spárovat s vaším chytrým zařízením.

- Sjeďte prstem dolů z horní části obrazovky pro otevření nabídky "Nastavení", poté podržte ikonu Bluetooth po dobu 2 sekund.
- 2. Přidržte ikonu Nastavení pro sluchové pomůcky na 2 vteřiny.
- 3. Zvolte "Ignorovat".
- 4. Otevřete aplikaci BeMore.
- Otevřete nabídku "BeMore Menu" a zvolte "Spárovat nová sluchadla". Pro připojení se pak řiďte pokyny na obrazovce. Teď je vše připraveno.



danalogic GN

Pokud máte potíže, navštivte naše webové stránky **www.danalogic.co.uk/patient-portal**, kde naleznete další pokyny, nebo kontaktujte svého audiologa.





Naskenujte mě pro okamžitý přístup k podpoře sluchových pomůcek, pokynům pro péči, instruktážním videím a dalším materiálům.

© 2024 GN Hearing A/S. Všechna práva vyhrazena. Danalogic je ochranná známka společnosti GN Hearing A/S. Apple, logo Apple, iPhone, iPad a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Slovní značka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Slovní značka a loga Auracast jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.



danalogic GN

Danalogic od GN usilovně pracuje na dosažení pozitivních výsledků v rámci celé cesty pacienta, což NHS umožňuje poskytovat lepší péči tam, kde je to skutečně důležité.

Danalogic je součástí skupiny GN Group – průkopník skvělého zvuku od špičkových sluchových pomůcek po kancelářské náhlavní soupravy Jabra a sportovní sluchátka. Společnost byla založena v roce 1869 a zaměstnává více než 5 000 lidí. GN zlepšuje zvuk života.

www.danalogic.co.uk



GN Hearing UK Ltd. Unit 13, Talisman Business Centre, Bicester OX26 6HR Tel: +44 1869 352 800 Fax: +44 1869 343 466 danalogicuk@gnhearing.com www.danalogic.co.uk

UK 10.89 A 8.2024