danalogic GN

danalogic Extend



您的新款 danalogic Extend 助听器是我们与 NHS 合 作推出的首款支持全新蓝牙® 低能耗音频协议的助 听器

蓝牙低能耗音频由消费电子行业与多家助听器制造商联合开发。蓝 牙低能耗音频经过优化,具有低能耗、低功耗、高音质和极低延迟等特 点。借助蓝牙低能耗音频技术,助听器可与电视机、笔记本电脑和其他 兼容蓝牙 5.3 的设备建立直接连接。danalogic Extend 助听器默认支持 该协议,还可连接 Auracast 广播音频。在连通性方面,这款助听器是真 正面向未来的解决方案,非常适合听障患者。

无需中间装置即可连接各类设备。蓝牙低能耗音频技术可全天传输 音频,同时延长电池寿命。

如需查看兼容的智能设备列表,请点击此处查看清单:

www.danalogic.co.uk/connectivity

danalogic Extend 助听器还支持在特定 Apple[®] 设备上使用免提通话功能。助听器用户可使用免提通话功能接听来电。此时助听器将作为麦克风收集用户发出的声音,同时传输来自手机的声音。如需查看兼容的 Apple 设备列表,请访问我们的网站:

www.danalogic.co.uk/connectivity

蓝牙低能耗音频助听器的优点

- 佩戴助听器打电话可能不太方便,而您的新 款助听器能够直接传输语音电话和视频电话, 让您轻松听见对方的声音。
- 您听音乐、看视频或听其他音频时不再需要 佩戴耳机,因为声音将直接传输至助听器。

连接助听器实现蓝牙传输

如果您有兼容的设备,请遵循本手册的步骤将 该设备与您的助听器连接。





如何将助听器与 Apple 设备配对

- 1. 将助听器关机。
- 2. 进入 Apple 设备的"设置"菜单开启蓝牙。 启用蓝牙后,滑块将变成绿色。
- 3. 返回主设置菜单,然后点击"辅助功能"。
- 4. 向下滚动至"助听设备"。
- 5. 如果您的助听器已开机,请重启。如果助 听器未开机,则请开机。此举将确保 Apple 设备能够发现助听器。





4:05 ৵	all 🗢 🔳	14:05 1
Back LP's Hearing Aids		Accessibility Hearing Devices
LP's Hearing Aids danalogic AM798-DWT	R III	MFL LIENTRING DEVICES LP's Hearing Aids danalogic AM798-DWT (R + L) Connected
Stream to right hearing device		Triple-click the Side button at any time to show hearing device options.
Stream to left hearing device		Play Ringtones
Adjust Independently		Play System Sounds
		Audio Routing
Bluetooth Pairing Request *LP's Hearing Aids" would like to pair with your iPhone		Control which audio is played in your hearing aids and sound processors.
	-	Control Nearby Devices
Cancel Pair		Control hearing device settings on nearby IOS devices.
reble	0	Audio Handoff
lass	0	Take the hearing device connection from nearby IOS devices when audio starts.
Forget this device		Control on Lock Screen
		Allow access to the hearing device shortcut at any time, including the Lock screen.
		HEARING AID COMPATIBILITY
		Hearing Aid Compatibility
		Hearing Aid Compatibility improves audio quality with some hearing aids.

- 点击"配对"。如果您有两只助听器,则需要接 受两次。
- 7. 前往 App Store 为助听器搜索"BeMore"。
- 8. 下载 BeMore 应用。打开应用并点击"开始"。
- 9. 遵循屏幕上的说明连接应用。现在可以使用了。

如需重新配对 Apple 设备

更换一侧或两侧助听器之后,您需要重新将其 与智能设备配对。

- 1. 首先移除原有的助听器:进入设置菜单。
- 2. 向下滚动并选择"辅助功能"。
- 3. 选择"助听设备"。
- 4. 在"MFI 助听设备"部分选择助听器并点 击"忘记此设备"。
- 5. 重启新助听器并点击"配对"。如果您佩戴 两只助听器,则需要点击"配对"两次。

14:04 🛪		, II 🗢 🔲
< Settin	ags Accessibility	
PHYS	ICAL AND MOTOR	
	Touch	>
[x]	Face ID & Attention	>
88	Switch Control	Off >
ø	Voice Control	Off >
Դ←	Side Button	>
	Apple TV Remote	>
	Keyboards	>
n	AirPods	>
HEAR	ING	
9	Hearing Devices	>
d)là	Sound Recognition	Off >
	Audio/Visual	>
F	Subtitles & Captioning	>
GENE	RAL	
A	Guided Access	Off >
Ì	Accessibility Shortcut	Off >

如何通过 danalogic Extend 助听器使用 iPhone[®] 和 iPad[®] 的免提通话功能

请确保您的设备兼容相关功能,详情请查阅我们的网站:www.danalogic.co.uk/connectivity

功能	使用方法	
接听来电	短按助听器按钮或滑动即可在 iPhone/iPad 上接听来电	
结束通话	按住助听器按钮数秒即可结束通话。 点击屏幕上的红色按钮也可结束通话	
第二通来电	如果在通话过程中有第二通来电拨入,长按助听器按钮或点击 iPhone/ iPad 屏幕上的"拒绝"按钮可拒接来电	
调节音量	使用 iPhone 或 iPad 上的增加和减少 音量按钮	
在 iOS 的助听器 设置中关闭免提 通话	连按三次 iPhone 按钮进入 iOS 的助听 器设置(也可通过控制中心进入)。选 择"输入选项",然后选择"关闭"	





扫描二维码观看使用方法视频,或访问: danalogic.co.uk/patient-portal



如何将助听器与 Android™ 设备配对

- 1. 前往 Google Play Store 搜索并下载 BeMore 应用。
- 2. 下载完成后,打开应用并点击"开始"。
- 遵循屏幕上的说明连接应用。现在可以使 用了。



14:12		淡 マゴ 🕯 82%		
	Getting connected	ı ×		
(J)	-0-	()		
Conn	ecting your hearing	ng aids		
Pair with Dave's Hearing ?				
Allow	access to your contacts a	and call history		
	Can	cel Pair		

如需重新配对 Android 设备

更换一侧或两侧助听器之后,您需要重新将 其与智能设备配对。

- 从屏幕顶部下滑打开"设置"菜单,然后 按住蓝牙图标 2 秒。
- 2. 按住助听器的设置图标 2 秒。
- 3. 选择"忘记"。
- 4. 打开 BeMore 应用。
- 5. 打开"BeMore 菜单"并选择"与新的助听 器配对"。然后遵循屏幕上的说明进行连 接。现在可以使用了。



danalogic GN

如果遇到困难,请访问我们的网站 www.danalogic.co.uk/patient-portal 获取更多 指导或联系您的听力医生。







扫描二维码即时访问助听器 支持、养护说明、使用方法视 频等内容。

© 2024 GN Hearing A/S。保留所有权利。Danalogic 是 GN Hearing A/S 的商标。 Apple、苹果标志、iPhone、iPad 和 iPod touch 是苹果公司在美国和其他国家的注册 商标。App Store 是苹果公司在美国和其他国家的注册服务标志。Android、Google Play 和 Google Play 标志是谷歌公司的商标。"蓝牙"文字标记和标志是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。Auracast 文字标记和标志是 Bluetooth SIG, Inc. 的商标。



danalogic GN

GN 旗下的 Danalogic 致力于为患者的治疗过程推动 积极的成果,同时帮助 NHS 在真正重要的健康领域 提供更优质的关爱服务。

Danalogic 的母公司 GN 集团是优质音频领域的先驱,产品包括世界领先的听力设备以及 Jabra 办公耳机和运动耳机。集团成立于 1869 年,现有员工 5,000 多人。GN 以促进听障人士的福祉为己任。

www.danalogic.co.uk



GN Hearing UK Ltd. 地址:Unit 13, Talisman Business Centre, Bicester OX26 6HR 电话:+44 1869 352 800 传真:+44 1869 343 466 danalogicuk@gnhearing.com www.danalogic.co.uk