


सफाई र प्रतिस्थापन


डेनालोजिक एक्स्टेन्डको लागि स्लिम ट्यूबहरू

सफाई


पहिले, तपाईं स्लिम ट्यूब र डोमलाई ओसिलो कपडाले पुछ्न सक्नुहुन्छ। यदि स्लिम ट्यूब मोम वा अन्य फोहोरले भरिएको छ भने, श्रवण सहायकको सम्पूर्ण ट्यूबलाई ध्यानपूर्वक तान्दै श्रवण सहायकबाट हटाउनुहोस्।

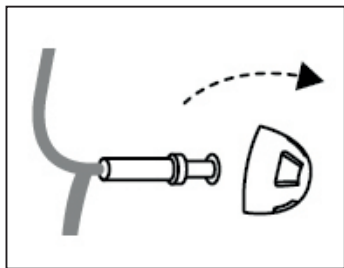

1. अर्को, रिब गरिएको छेउबाट तानेर डोम हटाउनुहोस्।

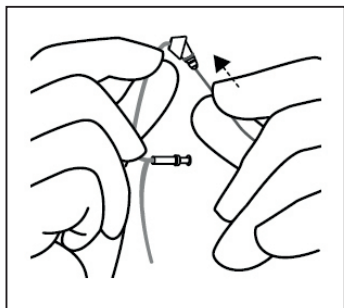


2. अब, स्लिम ट्यूबको माथिबाट सफा गर्ने तार धकेल्नुहोस् जहाँ यो श्रवण सहायकमा जडान हुन्छ। कुनै पनि फोहोर पूर्ण रूपमा हटाउन सफा गर्ने तारलाई पूर्ण रूपमा थ्रेड गर्नुहोस्।

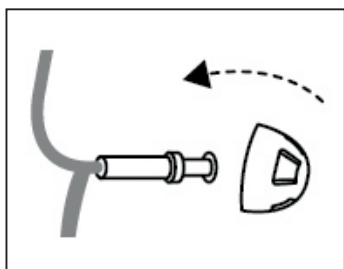


3. अब, डोमलाई स्लिम ट्यूबमा फिर्ता धकेल्नुहोस्।

डानालोजिक एक्स्टेन्डको लागि स्लिम ट्यूबहरू सफा गर्ने र प्रतिस्थापन गर्ने (जारी)

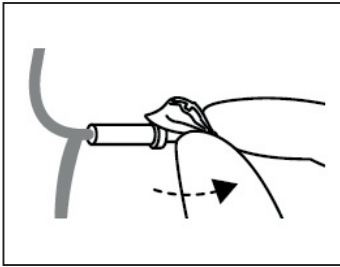

4. डोमको तल्लो भागलाई सावधानीपूर्वक उठाएर र कलरले स्लिम ट्यूबको रिब्ड छेउलाई पूर्ण रूपमा ढाक्छ भनी प्रमाणित गरेर डोम सुरक्षित छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्।

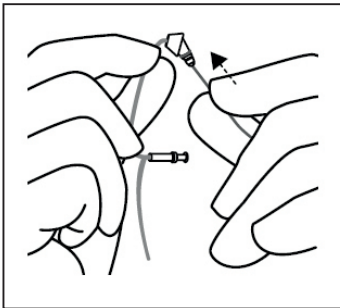

5. अन्तमा, स्लिम ट्यूबलाई श्रवण सहायकमा फिर्ता धकेल्नुहोस् जब सम्म यो दृढतापूर्वक ठाउँमा क्लिक गर्दैन।

प्रतिस्थापन

यदि तपाईंलाई आफ्नो स्लिम ट्यूब बदल्न आवश्यक छ भने, तपाईंको श्रवण सहायकबाट सम्पूर्ण ट्यूब तान्नुहोस् र नयाँले बदल्नुहोस्, यो क्लिक दृढतापूर्वक ठाउँमा छ भनी सुनिश्चित गर्दै। तपाईंको नयाँ स्लिम ट्यूबमा नयाँ डोम सही रूपमा फिट गरिएको छ भनी सुनिश्चित गर्न माथिका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।



थप समर्थनको लागि, QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् वा हाम्रो बिरामी समर्थन पोर्टलमा जानुहोस्: danalogic.co.uk/patient-portal