


डेनालोजिक एक्सटेन्डको साथ आइफोन र आइप्याडको लागि ह्यान्ड्स-फ्री कलहरूको आनन्द कसरी लिने

कृपया हाम्रो वेबसाइट यहाँ जाँच गरेर आफ्नो उपकरण उपयुक्त छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्
www.danalogic.co.uk/connectivity

कार्य	कसरी
कलको जवाफ दिने	आफ्नो श्रवण सहायता बटनमा छोटो प्रेस प्रयोग गर्नुहोस् आइफोन/आइप्याडमा जवाफ दिन स्लाइड गर्नुहोस्
कल समाप्त गर्नुहोस्	कल समाप्त गर्न केही सेकेन्डको लागि आफ्नो श्रवण सहायता बटन थिच्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, आफ्नो स्क्रिनमा रातो बटन ट्याप गरेर काट्नुहोस्
दोस्रो आगमन कलहरू	यदि तपाईं कलमा हुनुहुन्छ र तपाईंको दोस्रो कल आउँदैछ भने, तपाईंले आफ्नो श्रवण सहायक बटनमा लामो समयसम्म थिचेर वा आइफोन वा आइप्याड स्क्रिनमा 'अस्वीकार गर्नुहोस्' ट्याप गरेर यसलाई अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ।
भोल्युम परिवर्तन गर्नुहोस्	आइफोन वा आइप्याडमा भोल्युम माथि र तल बटनहरू प्रयोग गर्नुहोस्
आईओएस श्रवण सहायता सेटिङहरूमा ह्यान्ड्स-फ्री कलहरू बन्द गर्नुहोस्	आईओएस श्रवण सहायता सेटिङहरू पहुँच गर्न आइफोन पुश बटनमा तीन पटक क्लिक गर्नुहोस् (तपाईंले नियन्त्रण केन्द्र मार्फत पनि पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ)। 'इनपुट विकल्पहरू' चयन गर्नुहोस् त्यसपछि 'बन्द' गर्नुहोस्।

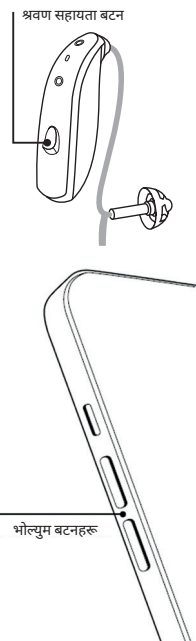

थप समर्थनको लागि, QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् वा हाम्रो बिरामी समर्थन पोर्टलमा जानुहोस्: danalogic.co.uk/patient-portal