


Rozpoznawanie prawego i lewego aparatu słuchowego danalogic Extend

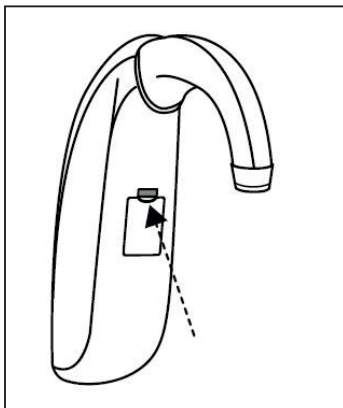

Aparaty słuchowe są programowane z myślą o konkretnym uchu. Niezwykle ważne jest noszenie odpowiedniego aparatu słuchowego w każdym uchu. Aparatów nie wolno zamieniać miejscami. Każdy aparat słuchowy jest oznaczony kolorem, aby łatwiej było odróżnić, z którym uchem jest zgodny.

Aparat słuchowy do prawego ucha jest oznaczony kolorem czerwony, a do lewego niebieskim.

Z tego rysunku dowiesz się, gdzie znajdują się kolorowe znaczniki.

Jeśli nie widzisz kolorowych znaczników, skontaktuj się z lokalnym oddziałem audiologicznym.



Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zeskanuj kod QR lub wejdź na portal wsparcia pacjenta: **danalogic.co.uk/patient-portal**