


Danalogic Extend ਨਾਲ iPhone ਅਤੇ iPad ਲਈ ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣੀਏ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
www.danalogic.co.uk/connectivity

ਫੰਕਸ਼ਨ	ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ	iPhone/iPad 'ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਦੇ ਬਟਨ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਦਬਾਓ
ਕਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ	ਕਾਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕੱਟੋ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ	ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲ 'ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ 'ਤੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ iPhone ਜਾਂ iPad ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ 'ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਓ/ਘਟਾਓ	iPhone ਜਾਂ iPad 'ਤੇ ਵਾਲਿਊਮ ਅਪ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
iOS ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ	iOS ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ iPhone ਪ੍ਰਸ਼ ਬਟਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)। 'ਇਨਪੁਟ ਵਿਕਲਪ' ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਬੰਦ ਕਰੋ' ਚੁਣੋ।

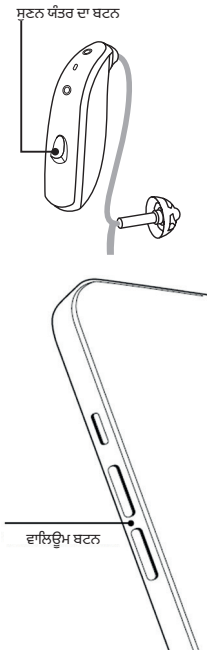

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: danalogic.co.uk/patient-portal