


ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਧਾਰਨ ਸਲਾਹ

ਤੁਹਾਡੇ Danalogic ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

- ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਸ ਜਾਂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਹਨ
- ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘੋਲ (ਸੋਲਵੈਂਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੁਬਾਓ
- ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਤ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ
- ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮ, ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੌਨਾ ਵਰਗੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਨੋ
- ਮੇਕ-ਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਪਰਫਿਊਮ, ਆਫਟਰਸ਼ੇਵ, ਹੇਅਰਸਪ੍ਰੇ ਜਾਂ ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਿਮ ਟਿਊਬ, ਡੋਮ, ਟਿਊਬਿੰਗ, ਈਅਰਮੇਲਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ / ਲੰਮੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਦੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਇਨਲੇਟ ਹਨ। (ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ)। ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਟ ਫਿਲਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ; ਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਵਾਂਗ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਇਨਲੇਟ ਉੱਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

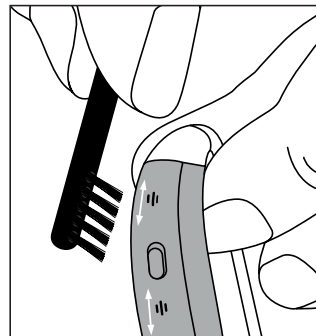

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:
danalogic.co.uk/patient-portal