


Как пользоваться функцией бесконтактной связи для iPhone и iPad с помощью Danalogic Extend

Проверьте совместимость устройства, перейдя на наш веб-сайт:

www.danalogic.co.uk/connectivity

Функция	Способ использования
Ответ на звонок	На iPhone/iPad для ответа используйте короткое нажатие на кнопку слухового аппарата или смахните
Завершение вызова	Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку слухового аппарата в течение нескольких секунд. Также можно завершить вызов, нажав красную кнопку на экране
Вторые входящие вызовы	Если вы разговариваете по телефону и вам поступает второй вызов, его можно отклонить, нажимая и удерживая кнопку слухового аппарата или коснувшись кнопки Decline (Отклонить) на экране iPhone или iPad
Регулирование громкости	Используйте кнопки увеличения и уменьшения громкости на iPhone или iPad
Отключите бесконтактную связь в настройках iOS для слухового аппарата	Трижды нажмите на кнопку iPhone, чтобы получить доступ к настройкам iOS слухового аппарата (также можно получить доступ через Центр управления). Выберите Input Options (Параметры ввода), затем Off (Выключить).

КНОПКА СЛУХОВОГО АППАРАТА

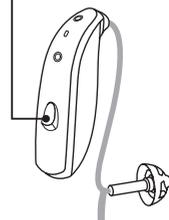

Для получения дополнительной поддержки отсканируйте QR-код или посетите наш портал поддержки пациентов:
danalogic.co.uk/patient-portal